

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ JMDN コード：16184000
プロフィーポイントアソートバリュー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 本品はニッケルを含有するため、ニッケルに対し、湿疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観
CA 用



2. 原材料
作業部：TPE
シャンク：ステンレススチール、ニッケルコーティング

3. 包装
100 本（4 色アソート） / 包

【使用目的又は効果】

歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品を歯科用ハンドピースに装着する。
 2. 本品に研磨ペースト（別売）を適量とる。
 3. 本品を歯面に軽く押し当て、研磨する。
- ※推奨回転数：3,000rpm
※最大回転数：6,000rpm

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 指定の最大回転数を超過して使用しないこと。
2. 損傷、変形（錆び、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
3. 使用する歯科用ハンドピースの取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
4. 使用前に口腔外で試運転し、振れがないことを確認すること。
5. 折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
6. 安全のため、保護眼鏡を使用すること。
7. 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
8. 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

【使用上の注意】

1. 本製品を用いた処置により発疹、皮膚炎等の過敏症状又はアレルギー症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。
2. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
3. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、環境によっては腐食（錆び）することがある。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
5. 使用後は必ず廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿や直射日光を避け、粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に破損やキズ、汚れ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：M2 Limited（エムツー リミテッド社）
製造国：中華人民共和国