

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN コード：35768000

再使用禁止**ポストブラシ NH****【禁忌・禁止】**

1. 本品はニッケルを含有するため、ニッケルに対し湿疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある者は使用しないこと。
2. 再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】**1. 外観**

CA 用

本品は形状の異なる複数種がある。

代表例：ストレート

**2. 原材料**

ブラシ：ナイロン

シャンク：真鍮（ニッケルコーティング）

3. 包装

12 本 / 包

【使用目的又は効果】

歯の清掃と研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 使用する前に本品が滅菌済みであることを確認すること。
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程含む 134℃以下厳守。）
2. 本品を歯科用ハンドピースに装着し、歯の清掃等を行う。
※最大回転数：1,500rpm

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 指定の最大回転数を超過して使用しないこと。
2. 損傷、変形（錆び、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
3. 使用する歯科用ハンドピースの取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
4. 使用前に口腔外で試運転し、振れがないことを確認すること。
5. 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
6. 安全のため、保護眼鏡を使用すること。
7. 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
8. 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

【使用上の注意】

1. 本品を用いた処置により発疹、皮膚炎などの過敏症状またはアレルギー症状が現れた場合は、使用を中止し医師の診察を受けること。
2. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 使用後は必ず廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿や直射日光を避け、粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に破損やヒビ、キズ、汚れなどの異常がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2. 滅菌について
[滅菌]
オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度乾燥工程含む 134℃以下厳守】
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。
[その他]
・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Frontier Dental Industrial Co., Ltd.
（フロンティアデンタル社）
製造国：大韓民国