

機械器具（69）歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDN コード：35761000

Fab キュア 1S

【禁忌・禁止】

目を損傷する恐れがあるため、光源を直視しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 仕様

寸法	180mm×190mm×233mm
重量	3.92 kg
電氣的定格	AC100～240V 50/60Hz
光源	LED-UV
波長	405 nm
ターンテーブル回転速度	10 r/min
重合サイズ（最大）	φ165 mm × 100 mm
重合時間（最長）	60 分

【使用目的又は効果】

歯科技工物等の光重合に用いる。

【使用方法等】

※詳細は取扱説明書を参照すること。

【使用方法】

取扱説明書に従って本品を水平な場所に設置し、歯科技工物等の二次硬化を行う。

【使用環境】

温度：10～30℃

湿度：30～70%RH（凍結・結露なきこと）

【使用上の注意】

- 精密機器のため、取扱いには十分注意すること。
- 機器の改造、分解はしないこと。
- 換気の良い場所で使用すること。
- 振動や傾斜のない安定した場所に設置すること。
- 可燃物がある場所、直射日光の当たる場所、熱源のある場所に置かないこと。
- 煙や異臭などの異常を確認した場合は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 水のかからない場所に保管すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 傾斜、振動、衝撃のない安定した場所に保管すること。

【保管条件】

温度：-10～70℃

【保守・点検に係る事項】

※詳細は取扱説明書を参照すること。

- 必ず定期点検を行うこと。
- しばらく使用していなかった本品を再度使用する時は、使用前に本品が正常かつ安全に動作することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Shining 3D Tech Co., Ltd.

（シャイニング スリーディー テック社）

製造国：中華人民共和国