

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN コード：70903000

コンポポリッシャー

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

CA 用

タイプ：ミディアム、ファイン



2. 原材料

作業部：シリコン、研磨剤

シャンク：ステンレススチール

3. 包装

8 本（4 種×ミディアム、ファイン 各 1 本） / 包

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 口腔内で使用する場合は、使用前に本品が滅菌済みであることを確認する。（オートクレーブ滅菌可。134℃以下厳守。）
2. 歯科用ハンドピースに装着し、補綴物等を研磨する。
※推奨回転数：7,000～10,000rpm
※最大回転数：10,000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

1. 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
2. 損傷、変形（錆び、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
3. 歯科用ハンドピースの取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
4. 使用前に試運転し、振れがないことを確認すること。
5. 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
6. 安全のため、保護眼鏡を使用すること。
7. 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
8. 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
3. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、環境によっては腐食（錆び）することがある。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿や直射日光を避け、粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後に破損やヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2. 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。血液、体液等で感染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

〔滅菌〕

・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度 134℃以下厳守】

〔その他〕

・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地