

## クオリブレス

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・同一患者以外への再使用禁止
- ・裁断加工禁止

#### 【形状・構造及び原理等】


##### 1. 概要

本品は、ポリエステル製の布で縫製された術後の創傷部を保護及び固定するためのベルトである。


サイズの違いにより各種ある。

##### 2. 外観形状

###### 1) 装着面

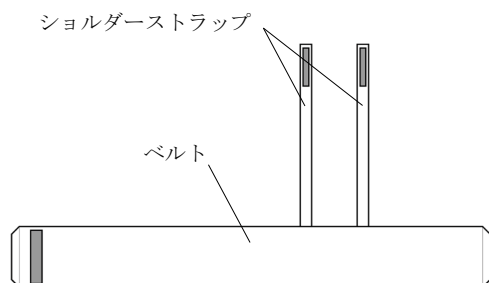

###### 2) 表面

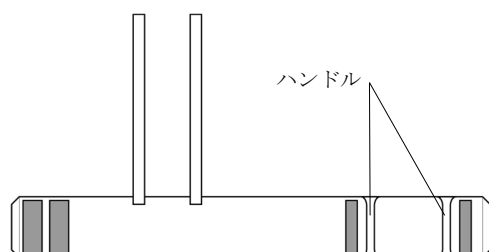

##### \*3. 種類

サイズ	ベルト寸法 (cm)		適用患者胸囲 (cm)
	長さ	幅	
4-6	76	10	56-62
6-8	84	10	62-68
8-10	90	10	68-75
XS	108	16	75-84
S	115	16	84-92
M	122	16	92-100
L	130	16	100-108
XL	138	16	108-113
XXL	146	16	113-122
XXXL	156	16	122-134
4XL	168	16	134-148

寸法には折り返し部分の長さも含まれる。

##### 4. 原理

伸縮性のある帯で胸部を固定することにより、胸部術後の創部の保護及び固定を行う。

#### 【使用目的】

本品は、適切なサイズの被覆・保護材を用いて術後創傷を保護・固定することを目的とするものである。

#### 【使用方法等】

1. 製品タグ（製造業者ラベル）が外側（患者に装着しない側）になるように本品を広げてベッドの上に置きます。
2. 患者を本品の上に仰向けに寝かせます。患者は製品の中心に寝かせ、ショルダーストラップが患者の頭の両側に見えることを確認します。
3. ベルトの両端を重ねて患者の正面で閉じ、胸骨切開部が2つのハンドルの中央にあることを確認します。
4. ショルダーストラップを前面の面ファスナーに装着します。
5. 必要に応じてハンドルを持って締め付け具合を調整します。
6. 必要に応じてショルダーストラップの位置を調整します。ベルトを高い位置で固定したい場合はショルダーストラップを背中中で交差させます。

#### 【使用上の注意】

##### 重要な基本的注意

- ・ベルトを上腹部に巻かないこと。

#### 【保守・点検に係る事項】

- ・本品が汚れた場合は、30℃の水での洗濯の他、ぬるま湯で部分的に洗浄することも可能である。
- ・本品を乾燥機で乾燥させないこと。
- ・本品を繰り返し洗濯すると、弾性が弱くなることがあるので注意すること。
- ・洗濯した場合でも、使用した患者以外の患者に使用しないこと。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：JP クリード株式会社  
東京都台東区西浅草 1-7-19  
TEL：03-6912-1090 FAX：03-6912-1091

外国製造業者：Qualiteam s.r.l.（イタリア）