

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDN コード：34654000

クオリベリー アドバンスド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 同一患者以外への再使用禁止
- ・ 裁断加工禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 概要


本品は、ポリエステルで縫製された術後の創傷部を保護及び固定するためのベルトである。
サイズの違いにより各種ある。

2. 外観形状

1) 装着面

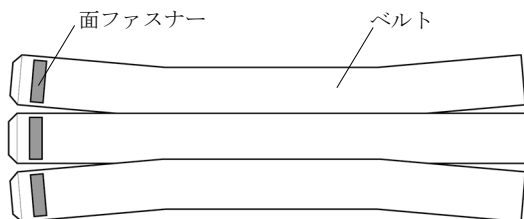

2) 表面

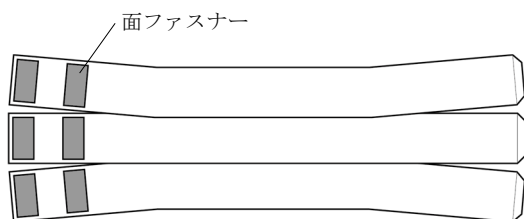

* 3. 種類

サイズ	ベルト寸法 (cm)		適用患者腹围 (cm) (腹部又は腰部の最大围)
	長さ	幅	
S	84	27 又は 40	65－85
M	100	27 又は 40	85－105
L	115	27 又は 40	105－125
XL	135	27 又は 40	125－145
XXL	156	27 又は 40	145－165
XXXL	175	27 又は 40	165－185
4XL	200	27 又は 40	185－205

寸法には折り返し部分の長さも含まれる。

4. 原理

伸縮性のある帯で腹部を固定することにより、腹部術後の創部の保護及び固定を行う。

【使用目的】

本品は、適切なサイズの被覆・保護材を用いて術後創傷を保護・固定するのを目的とするものである。

【使用方法等】

1. 製品タグ（製造業者ラベル）が外側（患者に装着しない側）になるように本品を広げてベッドの上に置きます。
2. 腹部の創傷、ドレーン及びストーマの位置に注意して、患者を本品の上に仰向けに寝かせます。
3. 3本のベルトの内、ドレーン又はストーマの出口の上下のベルトを先に締めてドレーンチューブ等をベルトの間から外へ出した後、残った1本のベルトを締めます。
4. 必要に応じて各ベルトの締め付け具合を調整します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ ベルトを上腹部に巻かないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 本品が汚れた場合は、30℃の水での洗濯の他、ぬるま湯で部分的に洗浄することも可能である。
- ・ 本品を乾燥機で乾燥させないこと。
- ・ 本品を繰り返し洗濯すると、弾性が弱くなることがあるので注意すること。
- ・ 洗濯した場合でも、使用した患者以外の患者に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：JP クリード株式会社
東京都台東区西浅草 1-7-19
TEL：03-6912-1090 FAX：03-6912-1091

外国製造業者：Qualiteam s.r.l.（イタリア）