

医療用品 04 整形用品

一般医療機 手術用被覆・保護材 JMDNコード：34654000

クオリブラ アドバンスド

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- ・同一患者以外への再使用禁止
- ・裁断加工禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、ポリエステルで縫製された術後の創傷部を保護及び固定するためのブラジャーである。
サイズの違いにより各種ある。

2. 外観形状

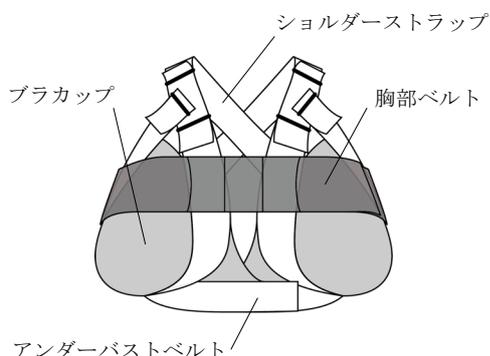

3. 種類

サイズ	胸部ベルト 長さ (cm)	適用患者サイズ	
		胸囲 (cm)	ブラカップ
XS	116	75-84	D, DD, E
S	123	84-92	D, DD, E
M	130	92-100	D, DD, E
L	138	100-108	D, DD, E
XL	146	108-113	D, DD, E
XXL	154	113-122	D, DD, E
XXXL	162	122-134	D, DD, E
4XL	174	134-148	D, DD, E
XS PLUS	116	75-84	F, FF 以上
S PLUS	123	84-92	F, FF 以上
M PLUS	130	92-100	F, FF 以上
L PLUS	138	100-108	F, FF 以上
XL PLUS	146	108-113	F, FF 以上
XXL PLUS	154	113-122	F, FF 以上
XXXL PLUS	162	122-134	F, FF 以上
4XL PLUS	174	134-148	F, FF 以上

4. 原理

乳房を固定し、伸縮性のある帯で胸部を固定することにより、胸腔術後の創部の保護及び固定を行う。

【使用目的】

本品は、適切なサイズの被覆・保護材を用いて術後創傷を保護・固定するのを目的とするものである。

【使用方法等】

1. 胸部ベルトが下、ブラカップの白い方が上になるように本品を広げてベッドの上に置きます。
この時、ショルダーストラップが交差していることを確認します。
2. 患者を本品の中央に仰向けに寝かせます。
3. アンダーバストベルトの両端を重ねて患者の乳房下で閉じ、ブラカップを適切な位置に配置します。
4. ショルダーストラップをブラ・アジャスターに通して留めます。
5. 胸部ベルトの両端を重ねて患者の胸の上で閉じ、胸骨切開部が2つのポケットの中央にあることを確認します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ベルトを上腹部に巻かないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品が汚れた場合は、30℃の水での洗濯の他、ぬるま湯で部分的に洗浄することも可能である。
- ・本品を乾燥機で乾燥させないこと。
- ・本品を繰り返し洗濯すると、弾性が弱くなることがあるので注意すること。
- ・洗濯した場合でも、使用した患者以外の患者に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：JP クリード株式会社

東京都台東区西浅草 1-7-19

TEL：03-6912-1090 FAX：03-6912-1091

外国製造業者：Qualiteam s.r.l.（イタリア）