

## 医療用品 04 整形用品

一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDNコード：34654000

## カーラ

## 再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

- ・同一患者以外への再使用禁止
- ・裁断加工禁止

## 【形状・構造及び原理等】

## 1. 概要


本品は、ポリエステル製の布で縫製された術後の創傷部を保護及び圧迫するためのベルトである。

サイズの違いにより各種ある。


## 2. 外観形状

## 1) 表面

ストラップ

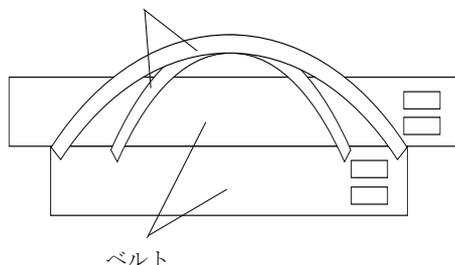

## 2) 装着面

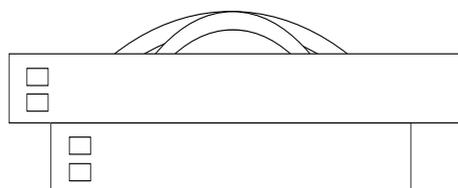

## 3. 種類

サイズ	ベルト寸法 (cm)		適用周囲(cm)
	長さ	幅	
XS	45、38	16	50-55
S	50、43	16	84-92
M	55、48	16	92-100
L	60、53	16	100-108
XL	65、58	16	108-113

## 4. 原理

伸縮性のある帯で頬、顎を固定・圧迫することにより、術後の創部の保護及び圧迫を行う。

## 【使用目的】

本品は、適切なサイズの被覆・保護材を用いて術後創傷を保護・圧迫するのを目的とするものである。

## 【使用方法等】

1. 製品タグ（製造業者ラベル）が外側（患者に装着しない側）になるように短い方のバンドを首に装着します。
2. 2本のストラップを耳の上を通して、頭の上にかけます。
3. ベルトの長い方をしっかりと頬、顎を圧迫するように頭の上で留めます。

## 【使用上の注意】

## 重要な基本的注意

- ・ベルトを強く締めすぎないこと。

## 【保守・点検に係る事項】

- ・本品が汚れた場合は、30℃の水での洗濯の他、ぬるま湯で部分的に洗浄することも可能である。
- ・本品を乾燥機で乾燥させないこと。
- ・本品を繰り返し洗濯すると、弾性が弱くなることがあるので注意すること。
- ・洗濯した場合でも、使用した患者以外の患者に使用しないこと。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：JP クリッド株式会社  
東京都台東区西浅草 1-7-19  
TEL：03-6912-1090 FAX：03-6912-1091

外国製造業者：Qualiteam s.r.l. (イタリア)