

医療用品 04 整形用品

一般医療機器

手術用被覆・保護材 JMDN コード：34654000

カーライバンド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・同一患者以外への再使用禁止
- ・裁断加工禁止

【使用目的】

本品は、適切なサイズの被覆・保護材を用いて術後創傷を保護・圧迫するのを目的とするものである。


【形状・構造及び原理等】

1. 概要


本品は、ポリエステル製の布で縫製された術後の創傷部を保護及び圧迫するためのベルトである。
ポリエステル織り方の違いにより 2 種ある。

2. 外観形状

1) 表面

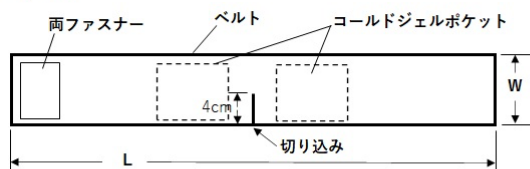

2) 装着面

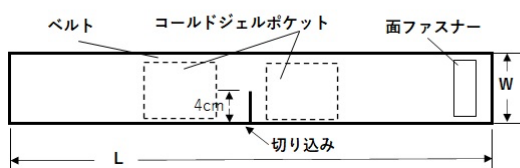

3. 種類

タイプ	ベルト	
	長さ cm	幅 cm
レース	130	8
ブリーズ	140	8

4. 原理

伸縮性のある帯で顔・眼周囲及び鼻周囲を固定及び圧迫することにより、術後の患部の保護及び圧迫を行う。

【使用方法等】

1. バンド中央部の切れ込みが鼻となるように位置を調整し、後頭部の面ファスナーで固定装着します。製品タグ（製造業者ラベル）が外側（患者に装着しない側）になるようにします。
2. 必要に応じてベルト上部の合わせ面から鼻両サイドのベルトポケットにコールドジェルを挿入します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ベルトを強く締めすぎないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品が汚れた場合は、30℃の水での洗濯の他、ぬるま湯で部分的に洗浄することも可能である。
- ・本品を乾燥機で乾燥させないこと。
- ・本品を繰り返し洗濯すると、弾性が弱くなることがあるので注意すること。
- ・洗濯した場合でも、使用した患者以外の患者に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：JP クリード株式会社

東京都台東区西浅草 1-7-19

TEL：03-6912-1090 FAX：03-6912-1091

外国製造業者：Qualiteam s.r.l.（イタリア）