

医療用品 04 整形用品

一般医療機器

手術用被覆・保護材 JMDN コード：34654000

トール 2

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・同一患者以外への再使用禁止
- ・裁断加工禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 概要


本品は、女性化乳房、胸筋移植、脂肪吸引術などの外胸腔組織における外科的介入後および胸部の外傷後の胸部の保護、固定のための支持帯である。

2. 外観形状

1) 表面

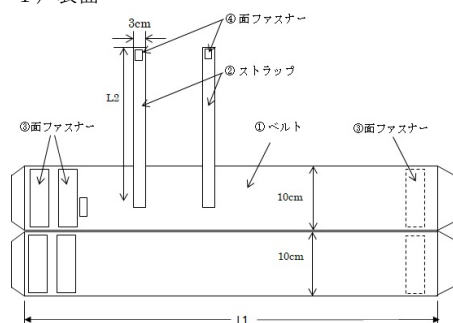

2) 装着面

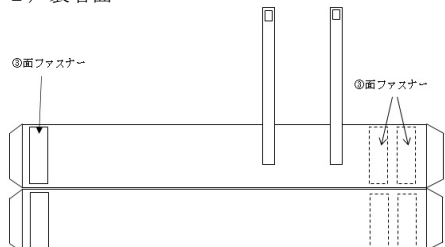

3. 種類

オーダー番号	サイズ	cm
THOR2-XS	Extra Small	84-92
THOR2-S	Small	92-100
THOR2-M	Medium	100-108
THOR2-L	Large	108-113
THO2R-XL	Extra Large	113-122
THOR2-XXL	Extra Extra Large	122-134
THOR2-XXXL	Extra Extra Extra Large	134-146
THOR2-4XL	Extra 4 Large	146-160

4. 原理

伸縮性のある帯で、胸部を固定することにより、術後及び外傷後の胸部の創部の保護、固定を行う。

【使用目的】

1. 本品は、女性化乳房、胸筋移植、脂肪吸引術などの外胸腔組織における外科的介入後および胸部の外傷後の胸部の保護、固定を目的としている。

【使用方法等】

1. 製品タグ（製造業者ラベル）が外側（患者に装着しない側）になるように本品を広げてベッドの上に置きます。
2. 患者を本品の上に仰向けに寝かせます。患者は製品の中心に寝かせ、ショルダーストラップが患者の頭の両側に見えることを確認します。
3. ベルトの両端を重ねて患者の正面で閉じます。
4. ショルダーストラップを前面の面ファスナーに装着します。
5. 必要に応じてショルダーストラップの位置を調整します。ベルトを高い位置で固定したい場合はショルダーストラップを背中と交差させます。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・サイズ選択を適切にすること。
- ・ベルトを上腹部に巻かないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品が汚れた場合は、30℃の水での洗濯の他、ぬるま湯で部分的に洗浄することも可能である。
- ・本品を乾燥機で乾燥させないこと。
- ・本品を繰り返し洗濯すると、弾性が弱くなることがあるので注意すること。
- ・洗濯した場合でも、使用した患者以外の患者に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：JP クリード株式会社

東京都台東区西浅草 1-7-19

TEL：03-6912-1090 FAX：03-6912-1091

外国製造業者：Qualiteam s.r.l.（イタリア）