

医療用品 04 整形用品  
 一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDNコード：34654000

## カーラコジー

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・同一患者以外への再使用禁止
- ・裁断加工禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 概要

本品は、ポリエステルで縫製された術後の創傷部を保護及び圧迫するためのサポーターブラジャーである。背面の形状、サイズの違いにより各種ある。

##### 2. 外観形状

###### 1) 前面 両タイプ共通



###### 2) 背面

###### レーザーバック



###### マルチバンド



##### 3. 種類

サイズ記載	適用胸囲(cm)
XS～S	65～85
M～L	80～95
XL～XXL	95～110

##### 4. 原理

通気性の良いアンダーワイヤー、縫い目のないブラジャーで乳房領域の術後の患部を固定及び圧迫を行う。

#### 【使用目的】

本品は、適切なサイズの被覆・保護材を用いて術後創傷を保護・圧迫するのを目的とするものである。

#### 【使用方法等】

1. アンダーバストサイズを測定し、サイズにあった本製品を体前部分のホックと肩上部の左右ホックで胸部に装着します。タグ（製造業者ラベル）が外側（患者の体に触れない側）になるように装着します。
2. 必要に応じてホックの位置を調整します。

#### 【使用上の注意】

##### 重要な基本的注意

- ・サイズ選択を適切にし、ホックで強く締めすぎないこと。

#### 【保守・点検に係る事項】

- ・本品が汚れた場合は、30℃の水での洗濯の他、ぬるま湯で部分的に洗浄することも可能である。
- ・本品を乾燥機で乾燥させないこと。
- ・本品を繰り返して洗濯すると、弾性が弱くなることがあるので注意すること。
- ・洗濯した場合でも、使用した患者以外の患者に使用しないこと。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：JPクリード株式会社  
 東京都台東区西浅草 1-7-19  
 TEL：03-6912-1090 FAX：03-6912-1091

外国製造業者：Qualiteam s.r.l.（イタリア）