

医療用品 04 整形用品

一般医療機 手術用被覆・保護材 JMDN コード：34654000

カーラ アブドミナル プロ S

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 同一患者以外への再使用禁止
- ・ 裁断加工禁止

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ ベルトを上腹部に巻かないこと。


【形状・構造及び原理等】

1. 概要


本品は、ポリエステルで縫製された術後の創傷部を保護及び固定するためのベルトである。
サイズの違いにより各種ある。

2. 外観形状

1) 装着面

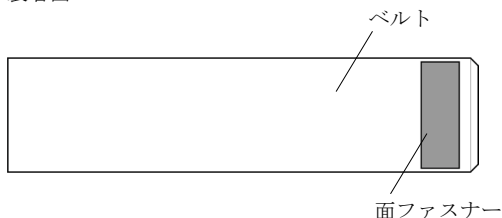

2) 表面

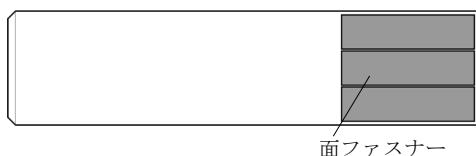

3. 種類

サイズ	適応サイズ
S	65-85 cm
M	85-105 cm
L	105-125 cm
XL	125-145 cm
XXL	145-165 cm
XXXL	165-185 cm
4XL	185-205 cm

4. 原理

伸縮性のある帯で腹部を固定することにより、腹部術後の創部の保護及び固定を行う。

【使用目的】

本品は、適切なサイズの被覆・保護材を用いて術後創傷を保護・固定するのを目的とするものである。

【使用方法等】

1. 本品を広げて面ファスナー（幅の広い方）の裏側を固定したい部分（腹部中央、左側または右側）にベルトの端を持って当てます。
2. もう一方の端を持って適切に締め、面ファスナーで固定します。
3. 必要に応じて締め付け具合を調整します。背中で交差させます。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 本品が汚れた場合は、30℃の水での洗濯の他、ぬるま湯で部分的に洗浄することも可能である。
- ・ 本品を乾燥機で乾燥させないこと。
- ・ 本品を繰り返洗濯すると、弾性が弱くなることがあるので注意すること。
- ・ 洗濯した場合でも、使用した患者以外の患者に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：JP クリード株式会社

東京都台東区西浅草 1-7-19

TEL：03-6912-1090 FAX：03-6912-1091

外国製造業者：Qualiteam s.r.l.（イタリア）