

メッキンパッドC

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止


【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

氏名:新タック化成株式会社
住所:香川県三豊市豊中町上高野4148番地
電話番号:0875-62-6555(代表)

【形状・構造および原理等】

<形状・構造>(代表図)

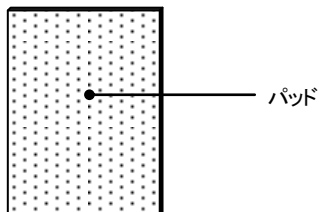

<材質>

- ・パッド:ポリエチレンネット状フィルム両面付脱脂綿

<原理>

創傷面への固着を防ぐフィルムと吸収層からなり、医薬品の塗布、少量の体液の吸収等に用いる。

【使用目的又は効果】

医薬品の塗布、少量の体液の吸収等を目的とする。

【使用方法等】

- 1)包装紙を開封し、直接手で触れないように中身を取り出す。
- 2)創傷面に静かに置き、体液の吸収を行う。[※]
 - ※医薬品の塗布を目的とする場合は、パッドに市販の医薬品等を塗布してから用いる。
 - ※創傷面に固定する場合は、市販のテープ・包帯等を用いる。

【使用上の注意】

- ・医薬品の塗布、体液の吸収以外の目的に使用しないこと。
- ・パッドが汚れたり、水に濡れたときは、新しいものに貼り替えること。
- ・包装が破損・汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。
- ・創傷面に固定する場合は、1日2~3回程度貼り替えを行い、パッドを清潔に保つこと。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等の皮膚の異常が認められた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水濡れ、直射日光、高温多湿を避け、室温で保管すること。

<有効期間>

パッケージに表示[自己認証による。]