

## メッキンガーゼ T

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### <形状・構造>

- ・綿100%のガーゼ製品。

##### <原理>

綿100%のガーゼからなる。出血の抑制や液の吸収、傷の保護に用いる。

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

#### 【使用方法等】

- ①手を清潔な状態にしてから滅菌包装よりピンセット等で取り出してください。
- ②滅菌ガーゼを使用部位に当ててください。
- ③ガーゼを包装や粘着テープ等(別売)で固定してご使用ください。

#### 【使用上の注意】

- ・個包装が開封、破損、水濡れ及び汚染がみられる場合は使用しないでください。
- ・ガーゼに問題がなくても1日2～3回貼り替えるようにしてください。
- ・キズ当て用として使用する場合は傷口を消毒してから使用してください。
- ・ご使用は機能、衛生上1枚1回限りとしてください。
- ・本品の使用により「かゆみ」「かぶれ」等が発生した場合は使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- ・使用後は感染に注意して衛生的に処理してください。
- ・直射日光を避け、湿気の少ない所に保管してください。
- ・お子様の手の届かない所に保管してください。
- ・本品は滅菌済みですので、個包装を破らないように保管し、開封後はすみやかにご使用ください。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### <保管方法>

水濡れ、直射日光、高温多湿を避け、室温で保管すること。

##### <有効期間>

パッケージに表示[自己認証による。]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### <製造販売業者>

氏名:新タック化成株式会社  
住所:香川県三豊市豊中町上高野4148番地  
電話番号:0875-62-6555(代表)