

機械器具 32 医療用吸引器  
一般医療機器 (JMDN コード 34858000)  
ディスポーザブル ポリープトラップ SBP-50-M

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・本製品の「添付文書」に従って使用すること。
- ・本製品は単回使用の使い捨てである。

### 【貯蔵・保管方法】

- ・水濡れに注意し、常温、常湿で、直射日光の当たらない清潔な場所に保管すること。

### 【有効期間・使用の期限】


- ・本製品は単回使用である、使用の期限は添付ラベルに記載の通りである。

### 【包装】

1個(袋入) 25個(箱入)

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 形状

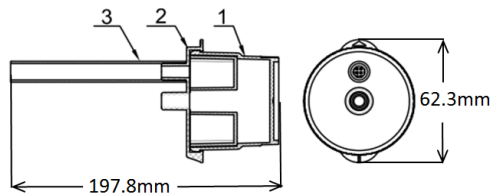

#### 2. 構造

- (1)収集カップ
- (2)フタ
- (3)接続チューブ

#### 3. 原理

接続チューブを内視鏡側に接続し、吸引を行うことにより組織を収集カップ内に回収し、一時的に保存する。

### 【使用目的または効果】

内視鏡の吸引口金と吸引器の間に接続し、吸引によって経内視鏡的に回収された組織を一時保存することを目的とする。

### 【操作方法又は使用方法等】

#### 使用方法

- 1.収集カップ中心を吸引機側につなぐ。
- 2.収集カップの外側の接続チューブを、内視鏡の吸引口金につなぐ。
- 3.カップを回転させて、蓋の矢印が「1」の位置に合っていることを確認する。
- 4.ポリープを回収する際は、フタを回転し、矢印を「1」に合わせて吸引する。
- 5.最初のポリープを取り込んだ後、ステップ3と同様に、必要に応じて矢印を自由な位置2,3,4に合わせる。
- 6.追加のポリープごとに手順4と5を繰り返す。(同一の患者に対してのみ)
- 7.蓋を開け、ピンセットやその他のツールを使用して組織標本を採取する。

### 【使用上の注意】

- ・本品及び包装に破損・汚損等の異常がないことを確認すること。
- ・使用中に異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、新しい製品と交換すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 湘栄ジャパン株式会社  
〒545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-19-28  
TEL 06-6627-1611

製造業者: Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd.(中国)

販売元(問合せ先): 湘栄ジャパン株式会社  
〒545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-19-28  
TEL 06-6627-1611