

機械器具 32 医療用吸引器
一般医療機器 (JMDN コード 34858000)
ディスポーザブル ポリープトラップ SBP-60-A

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 本製品の「添付文書」に従って使用すること。
- 本製品は、単回使用の使い捨てである。

【貯蔵・保管方法】

- 水濡れに注意し、常温、常湿で、直射日光の当たらない清潔な場所に保管すること。

【有効期間・使用の期限】


- 本製品は単回使用である、使用の期限は添付ラベルに記載の通りである。

【包装】

1個(袋入) 25個(箱入)

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

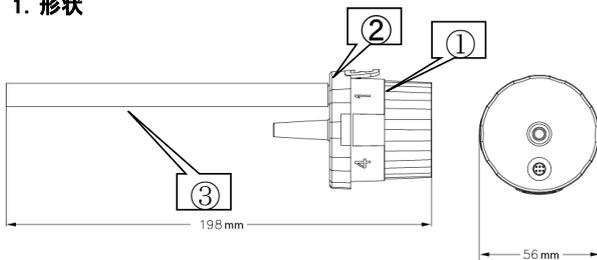

2. 構造

- ① 収集カップ
- ② フタ
- ③ 接続チューブ

3. 原理

接続チューブを内視鏡側に接続し、吸引を行うことにより組織を収集カップ内に回収し、一時的に保存する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 湘栄ジャパン株式会社
〒545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-19-28
TEL 06-6627-1611

製造業者: SML Med-Tech Solutions Limited (中国)

販売元(問合せ先): 湘栄ジャパン株式会社
〒545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-19-28
TEL 06-6627-1611

【使用目的または効果】

回収された組織を一時保存することを目的とする。

【操作方法又は使用方法等】

使用方法

- 収集カップ中心を吸引機側につなぐ。
- 収集カップの外側の接続チューブを、内視鏡の吸引口金につなぐ。
- カップを回転させて、蓋の矢印が「1」の位置に合っていることを確認する。
- ポリープを回収する際は、フタを回転し、矢印を「1」に合わせて吸引する。
- 最初のポリープを取り込んだ後、ステップ3と同様に、必要に応じて矢印を自由な位置2,3,4に合わせる。
- 追加のポリープごとに手順4と5を繰り返す。(同一の患者に対してのみ)
- 蓋を開け、ピンセットやその他のツールを使用して組織標本を採取する。

【使用上の注意】

- 本品及び包装に破損・汚損等の異常がないことを確認すること。
- 使用中に異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、新しい製品と交換すること。