

アダプタ(タイプT) SST-90

再使用禁止

EOG滅菌済

【警告】

- ・本品に過剰な力を加えないこと「本品が損傷する恐れがある」
- ・本品使用中異常が認められたとき、速やかに使用を中止し、適切な処置を施す。「重篤な健康被害が発生する恐れがある」


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品はアダプタ単品である

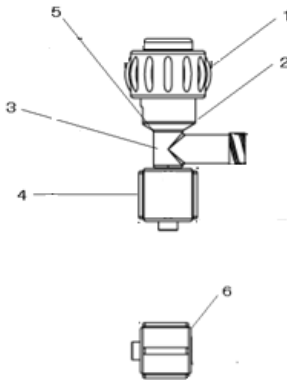

- | | |
|-----------|-----------|
| 1 ナット | 2 バルブ |
| 3 本体ハウジング | 4 ルアーコネクタ |
| 5 ワッシャー | 6 キャップ |

2. 原材料

ナット	ポリカーボネイト
バルブ	シリコン
本体ハウジング	ポリカーボネイト
ルアーコネクタ	強ポリエステル
ワッシャー	PTFE
キャップ	ABS

3. 原理

本品は、二つのカテーテル構成部品を接続したり、機器同士の接続に使用する。ドレナージ用カテーテル等への接続や液流の遮断等を行い、液漏れやエアアスピレーションを防止する為にも使用されます。

【使用目的または効果】

本品は医家向けの医薬品注入装置で、滅菌済みディスプレイ製品です。本品は、カテーテルを容器等の別の対象物に接続したり、灌注又は排液用カテーテルを身体に挿入するために用いる。

【使用方法等】

使用方法

1. 点検

滅菌パックに異常が無いこと。
本体に亀裂が無いこと。

- アダプタ(タイプT)を内視鏡の鉗子口に接続する。灌流液の漏れを防ぎながら、使用する器具を挿入する。
- ナットを反時計回りにいっぱい回してシールを開いてから、処置具などを目的の部位まで挿入する。目的部位まで挿入した後、シールが処置具などと密着し、かつ処置具の動作を妨げることがない程度まで、ナットを時計回りに回して閉める。
- 必要に応じて、サイドアームから薬液を注入する。

及び施設の感染防止に関する規定に従って廃棄する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

液体が漏れる恐れがあるため、処置具を目的の部位まで挿入した際は、ナットを回してシールをしっかりと密着させること。

1. 重要な基本的注意

- ① 本品を用いた処置、取扱は、術野が確保された状態で慎重に行うこと。
- ② 目的に応じたサイズ、形状を選択して使用すること。
- ③ 接続が困難な場合は使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- ④ 本品を強酸、強塩基に類する薬剤及び有機系溶剤にさらさないこと。

2. 不具合

本品の使用に伴い、以下のような不具合が発生する場合がある。
重大な不具合
アダプタ破損

【保管方法・有効期限等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、日光、蛍光灯、紫外線殺菌装置等の光、高温及び多湿を避けて保管すること。

2. 有効期限

使用の期限は包装に表示されている。

【包装】

1個/袋入り(表示) 25個/紙箱(表示)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 湘栄ジャパン株式会社

〒545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-19-28
TEL 06-6627-1611

製造業者: 三矢メディカル株式会社
日本国内

販売元(問合せ先): 湘栄ジャパン株式会社

〒545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-19-28
TEL 06-6627-1611