

機械器具 11 放射線障害防護用器具
一般医療機器 放射線防護用術者向け眼鏡 (JMDN38884000)

Uniray ゴーグル

【形状・構造及び原理等】

ガラスやプラスチックなどの鉛と同等の材料から作られたレンズ付きフレームとサイドシールドで構成されている。レンズとシールドは液状の放射性物質から保護するための物理的障壁ともなっている。非矯正（非処方）眼鏡と視力矯正用（処方）眼鏡がある。

【使用目的又は効果等】

診断や治療のための医科/歯科処置に伴う一次放射線や散乱放射線による不必要な被曝から術者や他の人員の眼を保護するために使用する。

【使用方法等】

150kV以下のX線で診療等を行う場合の散乱線防護用として使用すること。

【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

- 1) 管電圧150kV以下のX線で診療を行う場合に散乱線からの被ばく量を低減させることを目的としており、一次放射線などの保護には使用しないこと。
- 2) X線防護材料に損傷、またはそのおそれのある場合は仕様しないこと。
- 3) 外観にゆがみ、変形等があるとき、レンズのはめ込みに緩みがある場合は使用しないこと。

(その他の注意事項)

- 1) レンズに鉛等が含まれているため衝撃に弱く、強い衝撃を受けると破損する恐れがある。破片で目や顔面に障害を受ける危険があるので十分に注意すること。
- 2) 重量があるため、汗で滑りやすくなる。眼鏡が不安定になるような姿勢や場所での作業は避けること。
- 3) レンズに傷がつくので、硬い布や紙などでこすらないこと。
- 4) 変形や損傷の原因になるので無理にフレームやテンプルを広げたり曲げたりしないこと。
- 5) 眼鏡の上に掛けて使用する際に、フレームの巾等がフィットしない場合は使用を避けること。
- 6) 廃棄する場合は必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処理業者に依頼すること。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

直射日光が当たる場所や高温多湿やほこりの多い場所は避けて保管すること

(有効期間)

X線防護材料に損傷をきたすまでとする。

【保守・点検に係る事項】

(使用者による保守点検事項)

始業・終業時に目視、触覚等により点検を行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：Jpi ジャパン株式会社
電話番号：03-6686-7909*

製造業者：Uniray Medical LLP (インド)