

機械器具 11 放射線障害防護用器具  
一般医療機器 放射線防護用手袋 (JMDN38364000)

## Uniray グローブ ラテックスフリー

### 【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

合成ゴムで構成され、指及び手の裏表へ達する全方向からの放射線を保護するよう形成されている。  
一部の手袋は液状の放射性物質や体液から保護するための追加的な物理的障壁を有している

### 【使用目的又は効果等】

術者や他の要員の手の全体を診断及び治療措置に関連した一次放射線や散乱放射線による不必要な被曝から保護するために使用する。

### 【使用方法等】

本品の着用は使用者の身体の大きさに適合するものを使用すること。

### 【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

- 1) かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- 2) 製品本体の特性状、鋭利なものに接触すると破れたり、穴があくことがあるため、使用前に損傷やピンホールがないことを十分に確認し使用すること。
- 3) 管電圧 150kV 以下のX線で診療を行う場合に散乱線からの被ばく量を低減させることを目的としており、一次放射線（直接線）などの保護には使用しないこと

### 【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

直射日光が当たる場所や高温多湿やほこりの多い場所は避けて保管すること。

(有効期間)

単回使用

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：Jpi ジャパン株式会社  
電話番号：03-6686-7909

製造業者：Uniray Medical LLP (インド)