


器具器械 09 汎用 X 線診断装置用非電動式患者台（40654000）
一般医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

JPI 脚部撮影台

【形状・構造及び原理等】

1) 形状と各部名称

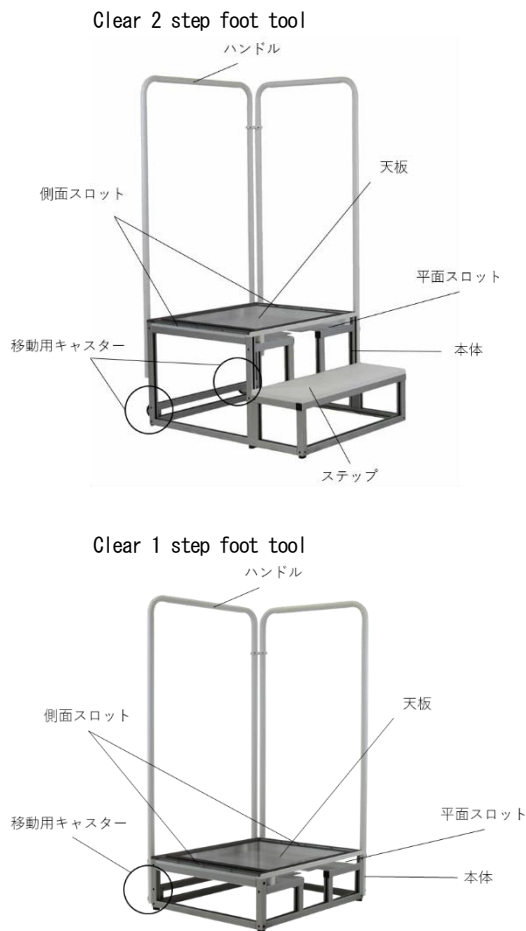

2) 構成

本装置は以下のユニットにより構成される。

- (1) 本体
- (2) ハンドル
- (3) 側面スロット
- (4) 天板
- (5) 平面スロット
- (6) ステップ (2 step のみ)
- (7) 移動用キャスター

3) 原理

装置の平面スロット及び側面スロットにカセットを取り付け、脚部の様々な箇所を撮影することができる。

4) 仕様

- ・Clear 2 step foot tool
外形寸法：132 x 66 x 82 (cm)
耐荷重：225kg 以下
重量：28kg
- ・Clear 1 step foot tool
外形寸法：111 x 63.2 x 53.3 (cm)
耐荷重：225kg 以下
重量：19.5kg

【使用目的、又は効果】

脚部の X 線撮影を効率よく行うことを目的とした専用撮影台で、平面スロット及び側面スロットによりカセットを保持する機能を有し、脚部の様々な箇所を撮影することが可能である。側面スロットの位置は 2 箇所あり、任意の位置にカセットを固定する事ができる。

【使用方法等】

1. 背面のキャスターを使用し、装置を任意の設置位置に調整します。
2. 被検者の撮影部位に応じてカセットを平面スロット及び側面スロットの位置に変更します。
3. X 線撮影を実施します。

使用環境条件

温度：+10℃～+40℃
湿度：30%～75%RH（結露のないこと）

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ① 使用を開始する前に装置に異常がないこと、構成品、付属品が確実に固定されていることを確認すること
- ② 被検者、操作者、介助者は装置の可動部分や装置と壁や床等に挟まれない様に常に注意を払うこと。
- ③ 耐荷重 150kg を超える荷重をかけないこと。

取扱説明書を必ずご参照ください。

高齢者適応

高齢者は握力など体力に問題がある場合はX線防護衣を着用した介助者を付けるなどして検査に臨むこと。

妊婦・産婦、授乳婦及び小児への適応

- ① 妊婦及び妊娠の疑いのある者及び授乳中の者へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと
- ② 小児の検査の場合はX線防護衣を着用した介助者を付けること。

その他の注意

この装置を廃棄する場合は、産業廃棄物となるので必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【製造業者および製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：Jpi ジャパン株式会社
電話番号：03-5804-6388

製造業者名：X-Ray Cassette Repair Co. Inc.
dba Reina Imaging（アメリカ）

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

使用環境条件に準ずる

温度：+10℃～+40℃

湿度：30%～75%RH（結露のないこと）

使用耐用年数（自主基準）

使用環境条件を満たした環境で

指定された保守点検を実施した場合 5 年

【保守・点検に係わる事項】

1) 使用者による保守点検事項

項目	点検頻度	点検内容
目視点検	始業時	キズ、変形
動作点検	始業時	動作不良、異音、引っ掛かり等の異常の有無
ガタ、ゆるみ等	月1回	各部にガタ、ゆるみ等が発生していないか
グリス切れ、ホコリ等	月1回	駆動部にゴミ、ホコリ等が溜まっていないか グリス・オイル切れが発生していないか

2) 業者による保守点検事項

項目	点検時期	点検内容
定期メンテナンス	年1回	各部のチェック、調整、増締め、注油、グリスUP、部品交換等

*保守契約。あるいは定期的なスポット点検依頼をしていただくようにお願いします。

取扱説明書を必ずご参照ください。