

作成日 2020 年 5 月 26 日

届出番号 37B3X100010000V1

一般医療機器 医 04 整形用品
救急絆創膏（JMDN コード 34864000）

キープケアテープ V

再使用禁止

(未滅菌)


【警告】

●使用中または使用后


本品の使用により発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

【形状、構造及び原理等】

救急絆創膏は粘着テープ、パッド、セパレーターからなる。
平面図

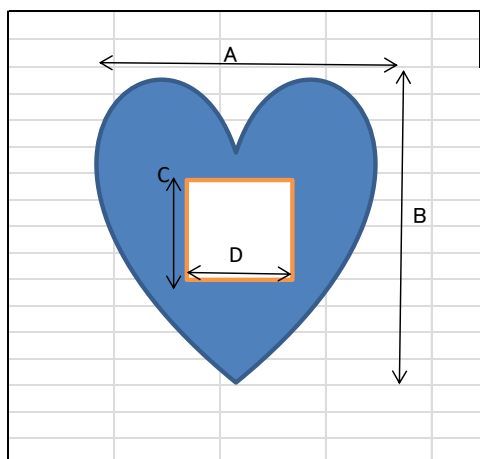

断面図

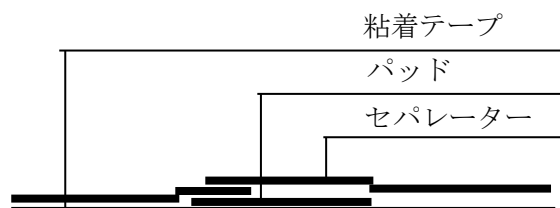

サイズ A : 40 mm ~ 55 mm B : 45 mm ~ 60 mm
C : 20 mm ~ 30 mm D : 12 mm ~ 22 mm

【使用目的、効能効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の軽微な創傷面の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【品目仕様等】

●物理特性

粘着テープ

項目	規格値等
粘着特性	1.47 N/cm 以上

【操作方法又は使用方法等】

被覆してある両端の剥離紙（セパレーター）をはぎ、中央のパッドに触れないようにして、パッドが傷口を保護するように貼り付ける。

【使用上の注意】

1. 単回使用
2. パッドの部分が濡れたり、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなるので貼り替えてください。
3. 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意してください。
4. 粘着面を患部に貼らないで下さい。
5. 小児に使用させるときは、保護者の指導監視のもとに使用させてください。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

1. 小児の手の届かないところに保管してください。
2. 直射日光のあたらない、湿気の少ない清潔な場所に保管して下さい。

【包装】

OP 袋包装、個装箱包装。入り数については箱の入り数を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者

氏名：株式会社シンヤ
第三種医療機器製造販売業
住所：香川県観音寺市出作町 606-1
電話：0875-57-5765

製造業者

氏名：株式会社シンヤ
住所：香川県観音寺市出作町 606-1
電話：0875-57-5765