

作成日

添付文書
届出番号 37B3X10001000101

一般医療機器 医 04 整形用品
救急絆創膏（JMDN コード 34864000）

救急バンC


再使用禁止 (未滅菌)

【警告】

●使用中または使用後
本品の使用により発疹・発赤・かゆみ・かぶれ
等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師
又は薬剤師に相談すること。

【形状、構造及び原理等】

救急絆創膏は粘着テープ、パッド、セパレーターからなる。
平面図

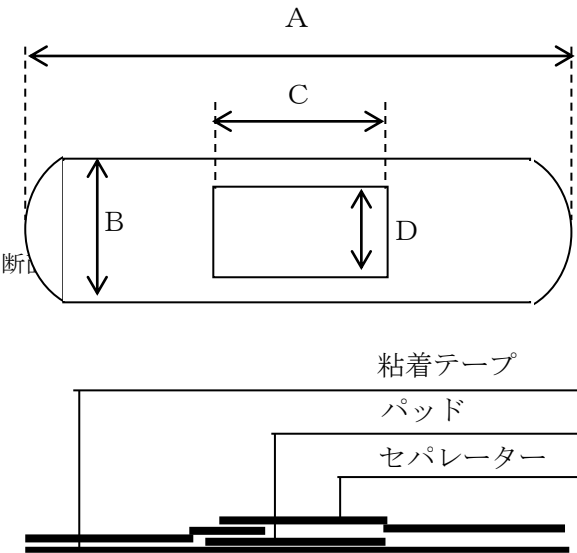

サイズ A : 72 mm B : 19 mm C : 24 mm D : 12 mm
: 55 mm : 13 mm : 17 mm : 7 mm

【使用目的、効能効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の軽微な創傷
面の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支
持等に用いる。

【品目仕様等】

●物理特性

粘着テープ

項目	規格値等
粘着特性	1.47N/cm 以上

【操作方法又は使用方法等】

被覆してある両端の剥離紙（セパレーター）をはぎ、中央
のパッドに触れないようにして、パッドが傷口を保護する

ように貼り付ける。

【使用上の注意】

1. 単回使用
2. パッドの部分が濡れたり、又は汚れたまま放置すると
傷の治りが悪くなるので貼り替えてください。
3. 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意し
てください。
4. 粘着面を患部に貼らないで下さい。
5. 小児に使用させるときは、保護者の指導監視のもとに
使用させてください。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

1. 小児の手の届かないところに保管してください。
2. 直射日光のあたらない、湿気の少ない清潔な場所に保
管して下さい。

【包装】

個装箱包装。入り数については箱の入り数を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者

氏名：株式会社シンヤ
第三種医療機器製造販売業
住所：香川県観音寺市出作町 606-1
電話：0875-57-5765

製造業者者

氏名：株式会社シンヤ
住所：香川県観音寺市出作町 606-1
電話：0875-57-5765

製造業者者

氏名：株式会社ニーズ
住所：香川県丸亀市川西町南甲 244-1
電話：0877-58-6767