

添付文書

作成日 2021/4/8

届出番号 37B3X10001000201

一般医療機器 医 04 整形用品
救急絆創膏 (JMDN コード 34864000)

7days, ケアテープ C

再使用禁止


(未滅菌)

【警告】

●使用中または使用後
本品の使用により発疹・発赤・かゆみ・かぶれ
等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師
又は薬剤師に相談すること。

【形状、構造及び原理等】

救急絆創膏は粘着テープ、パッド、セパレーターからなる。
平面図

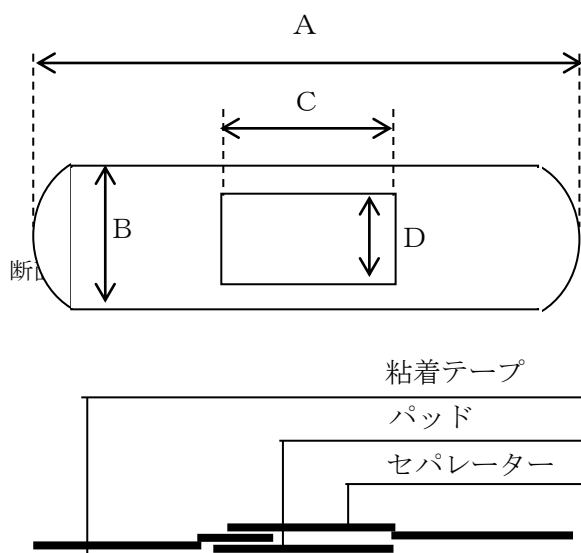

サイズ A : 72 mm B : 19 mm C : 24 mm D : 12 mm
: 55 mm : 13 mm : 17 mm : 7 mm

【使用目的、効能効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の軽微な創傷
面の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支
持等に用いる。

【品目仕様等】

●物理特性

粘着テープ

項目	規格値等
粘着特性	1.47N/cm 以上

【操作方法又は使用方法等】

被覆してある両端の剥離紙 (セパレーター) をはぎ、中央
のパッドに触れないようにして、パッドが傷口を保護する

ように貼り付ける。

【使用上の注意】

1. 単回使用
2. パッドの部分が濡れたり、又は汚れたまま放置すると
傷の治りが悪くなるので貼り替えてください。
3. 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意し
てください。
4. 粘着面を患部に貼らないで下さい。
5. 小児に使用させるときは、保護者の指導監視のもとに
使用させてください。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

1. 小児の手の届かないところに保管してください。
2. 直射日光のあたらない、湿気の少ない清潔な場所に保
管して下さい。

【包装】

個装箱包装。入り数については箱の入り数を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者

氏名：株式会社シンヤ
第三種医療機器製造販売業
住所：香川県観音寺市出作町 606-1
電話：0875-57-5765

製造業者者

氏名：株式会社シンヤ
住所：香川県観音寺市出作町 606-1
電話：0875-57-5765

製造業者者

氏名：株式会社ニーズ
住所：香川県丸亀市川西町南甲 244-1
電話：0877-58-6767