

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

GEO 技工用アナログ

【禁忌・禁止】

- ・併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- ・適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。
- ・本品は模型上で使用するものであり、口腔内では使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

ラボアナログ



【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる
歯科技工用の器具である。

*【使用方法等】

- 1.インプラントの印象を採得する。
- 2.採得した印象体に本品を取り付ける。
- 3.一般的な方法で作業模型を作成し、技工物を作製する。

【使用上の注意】

- 1.重要な基本的注意
- ①歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。ご使用に際しては歯科医療有資格者が適用の可否を判断すること。
- ②本品は本書に記載の使用目的以外に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.本品は品質保持のため高温、多湿、直射日光のあたる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
- 2.歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者：

株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051

外国製造業者：GeoMedi Co.,Ltd.
（ジオメディ）

外国製造所国：大韓民国