

機械器具（58）整形用機械器具  
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

## GEO インプラント技工パーツ

### 【禁忌・禁止】

- ・併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- ・適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。
- ・本品は模型上で使用するものであり、口腔内では使用しないこと。

- ③ 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。使用に際しては歯科医療有資格者が適用の可否を判断すること。
- ④ 本品は本書に記載の使用目的以外に使用しないこと。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*\*製造販売業者：  
株式会社ジオメディ  
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル  
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051

外国製造業者：GeoMedi Co.,Ltd.  
（ジオメディ）

外国製造所国：大韓民国

### \*【形状・構造及び原理等】

①ラボ用 GEO CCM



②ラボ用 GEO Ti スリーブ



③プラスチックスリーブ



④スクリュー



### <原材料>

名称	原材料
①ラボ用 GEO CCM	コバルトクロム合金
②ラボ用 GEO Ti スリーブ	チタン合金
③プラスチックスリーブ	ポリアセタール
④スクリュー	チタン合金

### 【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

### \*【使用方法等】

<①ラボ用 GEO CCM ②ラボ用 GEO Ti スリーブ ③プラスチックスリーブ>

1. 作業模型のアナログに取り付ける。
2. 本品の上に WaxUp する。

<④スクリュー>

1. アナログに本品で固定する。

### \*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ① 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた術者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ② 本品に含まれている配合成分及び類似成分に対して過敏症の疑いがある場合には必ず事前にアレルギーテスト（パッチテスト）を行い、問題がないことを確認した後、使用すること。アレルギーテストは皮膚科の専門医に相談すること。