

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ JMDN 32692000

DR.KIM ヘッドランプ

【禁忌・禁止】

1. 本機器は防水加工されていないため、湿気のあるところでの保管および使用はしないこと。水がかからないようにすること。
2. 本機器で直接太陽を見たり、レーザー装置などの高傾度の照明装置を見たりしないこと。眼には重篤な重症を負う可能性がある。
3. 本機器の各部接続部や光学系、眼鏡フレームなどに異常が認められる場合には、本機器の使用はしないこと。

**【形状・構造及び原理等】

1. ヘッドランプ

- a. DKH-50



2. ルーペ

- a. DKL-5



3. テレスコープ

- a. DKT-3



- b. DKT-4



4. バッテリーセット


- a. DKBT-2
b. DKCG-2



5. D-CAM4

- a. カメラ（レンズ及びセンサー部、FPCB、カメラ制御部）
b. HDMI ケーブル
c. 送信機
d. 受信機
e. コネクター
f. レンズキャップ
g. 充電ケーブル
h. リモコン

i. SD カードアダプター

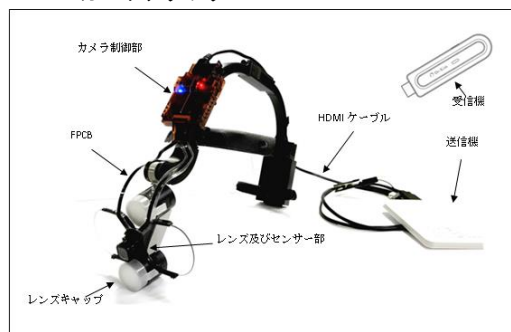

※本製品は、専用ケース(下記写真)に入れて持ち運びが可能である。



【使用目的又は効果】

本品は外科処置時に術者が装着する眼鏡に取り付けられたレンズから成るシステムをいう。小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。観察野に直接光を供給する外部光源を付属する。

【使用方法等】

1. 本機器の各部に緩みがないことを確認する。
2. 瞳孔間距離の調整をする。
3. ルーペがヘッドランプに装着された状態でカメラ制御部をフロントバンド前方に取り付ける。
4. カメラレンズの裏側にある爪をルーペの中央部に挟み込む。
（ルーペ未装着の場合は、コネクターをヘッドランプに装着して同様にカメラの裏側の爪を挟み込む）
5. ケーブルが邪魔にならないよう中央に通す。
6. DHMI 入力のあるディスプレイ機器に受信機を接続し、カメラと送信機を HDMI ケーブルで接続する。

詳細は本機器の取扱説明書を参照のこと

【使用上の注意】

取扱説明書等を参照すること

1. 本機器の使用前には、各部に緩みがないことを確認すること。
2. 本機器を高いところから落下させたりぶつけたりしないこと。
3. 本機器は耐熱性ではありません。滅菌等で加熱しないこと。
4. バッテリーを高温になる場所で充電しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本機器は、歯科従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
2. 本機器は、水や油等のかからない場所で保管すること。
3. 本機器を長期間使用しない場合は、バッテリーを本体から

- 外し、湿気の少ないところに保管しておくこと。
4. バッテリーを可燃性のものの近くや高温になる場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による点検

本機器を安全に使用するために、使用前には毎回以下の項目を確認すること。

- ・各部に緩みがないこと
- ・光学系に曇りや汚れがないこと
- ・損傷している箇所がないこと
- ・各部が正しく機能すること

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

*製造販売業者：

株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051

外国製造業者：DR-KIM（ドクターキム）

外国製造所国：大韓民国