

*2022年3月1日(改訂第2版)
2016年4月15日(新様式第1版)

医療機器届出番号 40B1X10003GE0023

歯科用エンジン(60) 歯科技工用機器
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 347130003

ドゥオンARUM5X

【禁忌・禁止】

1. 本製品を治療の目的以外に使用しないこと。
2. 劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。
3. 器具の形態変更や改造等をしないこと。

【形状・構造及び原理等】



【保守・点検に係る事項】

- 詳細については取り扱い説明書を参照すること。
1. 必ず定期的に点検を行うこと。
 2. しばらく使用してない状態の後再度使用する場合は、必ず各部の作動確認を行ってから使用すること。
 3. 故障した場合は、訓練を受けた有資格者以外は修理しないこと。修理が必要な場合は、専門家に依頼すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*選任製造販売業者:

株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目38-28 ジオビル
TEL: 092-409-4050 FAX: 092-409-4051

外国製造業者: DOOWONID CO.,Ltd
(ドゥオン)

外国製造所国: 大韓民国

	試験項目	仕様
1	寸法 (W×H×L)	1200×1600×780mm
2	重さ (Kg)	234Kg
3	スピンドル回転数	2,000~60,000rpm
4	電源	AC100V
5	軸	5軸

【使用目的又は効果】

本品は本品は複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計(CAD)又はコンピュータ支援製造(CAM)に用いるものをいう。

【使用方法等】

1. テーブルにジルコニアディスクを載せる。
2. 全面の扉を閉じ、スイッチを入れる。
3. ジルコニア、PMMA、レジン、チタン、コバルトクロム合金、セラミックガラスのディスク状の材料をミリングする。

【使用上の注意】

1. 術者は、手技等を熟知したうえで使用すること。
2. 素材のステンレス鋼は鉄に比べて錆びにくい金属であるが、使用方法及び環境によって錆びることがあるので十分に注意すること。
3. 金属腐食を起こす恐れのある薬剤、超酸性水等は使用しないこと。
4. 使用後は埃等を取り除くこと。
5. 【保守・点検に関わる事項】を参照し、保守・点検を行うこと。
6. 可燃性ガスの付近では使用をしないこと。
7. 故障の際は、有資格者・専門家以外修理を行わないこと。