

**2022年3月1日(改訂第5版)
*2017年12月1日(改訂第4版)

医療機器届出番号 40B1X10003GE0058

機械器具(58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

GEO リンク

【禁忌・禁止】

- 併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- 適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。
- 本品は模型上で使用するものであり、口腔内では使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】



原材料： チタン合金 (Grade 5)

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料である。

*【使用方法等】

- 印象採得後、硬化した印象材に適合するアナログを連結し、石膏を注入し作業模型を製作する。
- 作業模型上のアナログに対応する補綴物の製作を行う。

ワックスアップする場合

本品に上部構造体をワックスアップし、パウダースプレー等を吹き付け、歯科技工室設置型コンピュータ支援設計(CAD)を用いてスキャンする。

ワックスアップしない場合

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計(CAD)専用の上
部構造デザインソフトウェアを用いて上部構造体のデザ
インを行う。

- 出来上がった上部構造体の設計データを歯科切削加工用セラミックス、ジルコニア、PMMA、WAX、ハイブリッドレジンを
用いて、歯科技工室設置型コンピュータ支援製造(CAM)で切削する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
①本品は本書に記載の使用目的以外に使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者：
株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051

外国製造業者：GeoMedi Co.,Ltd.
(ジオメディ)

外国製造所国：大韓民国