

\*\*2022 年 3 月 1 日作成(第 4 版)  
\*2021 年 7 月 5 日作成(第 3 版)

製造販売届出番号 40B1X10003GE0085

機械器具 (58) 整形用機械器具  
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

## MegaGen スキャンアバットメント

### 【禁忌・禁止】

- ① 併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- ② 適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。

### 【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる  
歯科技工用の器具・材料をいう。

### 【操作方法又は使用方法等】

本品は CAD/CAM 専用に使われる技工材料である。

- 1) 作業用模型のレプリカに本品をスクリューで固定する。
- 2) 本品を作業用模型に装着し、歯科用印象材または作業用模型をスキャンし、インプラント体の方向、位置を画面上で確認する。
- 3) 専用ライブラリを使用して支台、上部構造をデザインする。

### 【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意  
① 本品は本書に記載の使用目的以外に使用しないでください。

### 【包装】

包装単位：1 個

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*\*製造販売業者：株式会社ジオメディ  
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル  
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051

\*総販売元：株式会社メガジェンジャパン  
大阪府大阪市中央区北久宝寺町 3-1-6  
TEL：06-6281-3535 FAX：06-6281-3538

外国製造業者：MegaGen Implant Co.,Ltd.  
(メガジェンインプラント)  
外国製造所国：大韓民国

### 【形状・構造及び原理等】

| 1) スキャンアバットメント                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 2) スキャンアバットメント (C タイプ)                                                              | 3) スキャンポスト                                                                          |
|  |  |
| 4) アバットメントスクリュー                                                                     | 5) スキャンポストキャリアー                                                                     |
|  |  |

取扱説明書を必ずご参照ください。