

**2025年12月9日作成(第6版)
*2025年8月27日作成(第5版)

製造販売届出番号 40B1X10003GE0085

機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

MegaGen スキャンアバットメント

【禁忌・禁止】

- 併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- 適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。

**【形状・構造及び原理等】

**1) スキャンアバットメント	
	
**1) スキャンアバットメント	2) スキャンアバットメント (Cタイプ)
	
3) スキャンポスト	*4) アバットメント スクリュー
	
5) スキャンポストキャリアー	*6) スキャンキャップ
	
*7) スキャンキャップ スクリュー	*8) スキャンバー
	
**9) シリンダー スクリュー	
	
*10) リバーススキャン	
	

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる
歯科技工用の器具・材料をいう。

*【操作方法又は使用方法等】

本品は CAD/CAM 専用で使用される技工材料である。

- 作業用模型のレプリカに本品をスクリューで固定する。
- 本品を作業用模型に装着し、歯科用印象材または作業用模型をスキャンし、インプラント体の方向、位置を画面上で確認する。
- 専用ライブラリを使用して支台、上部構造をデザインする。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
① 本品は本書に記載の使用目的以外に使用しないでください。

【包装】

包装単位：1個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051

総販売元：株式会社メガジェンジャパン
大阪府大阪市中央区北久宝寺町 3-1-6
TEL：06-6281-3535 FAX：06-6281-3538

外国製造業者：MegaGen Implant Co., Ltd.
(メガジェンインプラント)

外国製造所国：大韓民国

取扱説明書を必ずご参照ください。