

**2022 年 3 月 1 日作成 (第 3 版)
*2021 年 7 月 5 日作成 (第 2 版)

製造販売届出番号 40B1X10003GE0103

機械器具 (69) 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 35761000

メガジェン RP-C500

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉



〈仕様〉

	項目	規格
1	サイズ	22(W)×15(D)×26(H)mm
2	重量	2.5kg
3	定格電圧	100-240V
4	周波数	50/60Hz
5	発光波長	395nm

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 傾斜、振動、衝撃等の加わらない安全な場所に保管すること。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
4. 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書を参照すること。

1. 必ず定期的に点検を行うこと。
2. しばらく使用していない状態後再度使用する場合は、必ず各部の作動確認を行ってから使用すること。
3. 故障した場合は、訓練を受けた有資格者以外は修理しないこと。また、修理は専門家に依頼すること。
4. プレートやチャンバーの反射板に埃や異物がいないかを確認すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者：株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051

*総販売元：株式会社メガジェンジャパン
大阪府大阪市中央区北久宝寺町 3-1-6
TEL：06-6281-3535 FAX：06-6281-3538

外国製造業者：MegaGen Implant Co.,Ltd.
(メガジェンインプラント)
外国製造所国：大韓民国

【使用目的又は効果】

歯科技工室内で、光重合型レジン材料を重合するために用いる。

【使用方法等】

詳細については取扱説明書を参照すること。

〈推奨使用環境〉

温度：5～30℃
相対湿度：30～70%

〈使用方法〉

1. 本品を水平で安定した台に設置する。
2. AC アダプターと電源ケーブルを接続し、電源を入れる。
3. チャンバーに重合する造形物を設置する。
4. 適切なモードを選択し、光重合を開始する。
5. 終了後、チャンバーから造形物を取り出す。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を参照すること。

1. 本品は精密機器であるため、取扱いには十分注意すること。
2. 本品を分解、修理、改造しないこと。
3. ランプを直視しないこと。
4. 引火性のものや可燃性のものを近くに置かないこと。
5. 水をかけないこと。
6. 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないこと。
7. 本品に異常が発生したときは、直ちに使用をやめること。

取扱説明書を必ずご参照ください。