

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用根管プラグ (JMDN:41876000)

EQコンデンサー

【禁忌・禁止】

本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

本品は、ニッケルチタン製の作業部とステンレススチール製の作業部がハンドル部の両側についている。

本品は、単品あるいは組み合わされて販売される。

作業部(A)

作業部(B)



ハンドル部

種類	作業部 (A)	作業部 (B)	色別
	径		
	テーパ		
N40/S80	0.40mm	0.80mm	グレー
	0.02	0.04	
N50/S100	0.50mm	1.00mm	オレンジ
	0.01	0.02	
N60/S120	0.60mm	1.20mm	ブルー
	0.01	0.01	

<原材料>

ニッケルチタン、ステンレススチール

*【使用目的又は効果】

先細の作業部分を持ち、根管に充填物を主に軸方向に充填または圧接することを目的とする。

*【使用方法等】

1. 使用部位や大きさなど用途に合うものを選択し、作業部で、充填物を軸方向に押さえるようにして充填する。
2. 使用後は作業部に付着したガッタパーチャ等をアルコール等で除去すること。
3. 洗浄、滅菌すること。詳細は【保守・点検に係る事項】による。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。[破折の原因となる。]
2. 作業部を火焰等であぶらないこと。[作業部の弾性等の性質が失われる場合がある。]

*【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
2. 本品に異常が発見された場合は、速やかに使用を中止する等、適切な措置をとること。
3. 本品は、患者の手に触れないようにすること。
4. 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
5. フェノールを含む消毒液を使用しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 乾燥している場所に保管すること。
2. 直射日光に当たらないようにすること。
3. 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

*【保守・点検に係る事項】

1. 滅菌前に超音波洗浄を行うこと。
2. 洗浄した後水気を完全に除去すること。
3. 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。滅菌条件は下記のとおりとする。
121℃、30分

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者:株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL:092-409-4050 FAX:092-409-4051
外国製造業者: META BIOMED CO.,LTD.(Head office)
(メタ バイオメド)
製造所国:大韓民国