

機械器具 (69) 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 35761000

LC-3D プリントボックス

【警告】

- 必ず操作手順に従って使用すること。
- 本機の定格(電圧、周波数)に適合する電源コンセントに接続すること。
- 燃えやすいものがあるそばに設置しないこと。
- 緊急時にすばやく電源プラグを抜けるようにすること。

【禁忌・禁止】

- 感電の恐れがあるため、濡れた手でプラグ及び電源スイッチに触れないこと。
- 引火しやすいため、作業場には火気を持ち込まないこと。
- 事故につながる恐れがあるため、分解、修理、改造はしないこと。
- 屋外、水のかかる場所、湿気の多い場所には設置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 寸法・重量

本体寸法 : 410mm(W) × 440mm(D) × 380mm(H)
本体重量 : 約 22kg

3. 原理

光を利用して樹脂を重合する。

<性能及び安全性に関する規格>

電圧、周波数	110V 或いは 230V,50/60Hz
消費電力	290W
UV Lamp	FPL 18W 78 color × 6pcs FPL 18W 71 color × 6pcs
サイズ(W,D,H)	410 × 440 × 380mm
機械重量	22kg

【使用目的又は効果】

主に 3D プリンターで作製したパーツの二次硬化に用いる。

【使用方法等】

マニュアルを参照すること。

NextDent 材料の照射時間の目安として下表の通りである。

NextDent Material Curing time

Material	Time (min.)
Cast	5
Model (Ortho)	10
Tray	10
Surgical Guide	10
Ortho Rigid	10
Gingiva Mask	10
Base	30
Crown & Bridge	30

【使用上の注意】

- 担当者以外は触らないこと。
- 使用しない時は電源コンセントを抜くこと。
- 使用時アースを接続すること。
- 作動時はドアを閉めること。
- 目的用途以外は使用しないこと。
- 精密機器のため、取扱には十分注意すること。
- 機器を分解、修理、改造しないこと。
- 異常発生又は故障したときは、直ちに担当者又は当社指定の業者に連絡すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光を避け、水のかからない室内に保管する。
- 振動、衝撃を受けない平らで安定した場所に保管する。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。
- 関係者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者 : 株式会社ジオメディ

福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル

TEL : 092-409-4050

FAX : 092-409-4051

外国製造業者 : Jaemyung Industrial Co., Ltd.

(ジェミヨンインダストリアル)

外国製造所国 : 大韓民国