

機械器具 (58) 整形用機械器具  
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

## SRN スキャンキャップ

### 【禁忌・禁止】

- ①劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。
- ②器具の形態変更や改造等をしないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

《外観》



《原材料》

PEEK

### 【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

### 【使用方法等】

本品は CAD/CAM 専用で使用される技工材料である。

- ①口腔内のインプラント体または作業用模型のレプリカにコーピング又は Ti-ベースをスクリューで締結する。
- ②本品をコーピング又は Ti-ベースに装着し、3D スキャナーを用いてスキャンする。

※本品を口腔内で使用する場合は、必ず事前にオートクレーブ等で滅菌を行うこと。

滅菌条件 温度:132℃、時間:20分

[使用方法に関連する使用上の注意]

製造販売業者指定以外の製品と組み合わせて使用しないこと。形状が異なるため適切な組み合わせが得られず、不具合および事故の原因となる恐れがある。

### 【使用上の注意】

- ①術者は、手技等を熟知したうえで使用すること。
- ②本品を治療の目的以外に使用しないこと。
- ③本品に含まれている配合成分及び類似成分に対して過敏症の疑いがある場合には必ず事前にアレルギーテスト(パッチテスト)を行い、問題がないことを確認した後、ご使用下さい。  
アレルギーテストは皮膚科の専門医にご相談ください。
- ③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*製造販売業者:株式会社ジオメディ  
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル  
TEL:092-409-4050  
FAX:092-409-4051  
外国製造業者:GeoMedi Co., Ltd.(ジオメディ)  
外国製造所国:大韓民国