

*2022 年 3 月 1 日作成(改訂第 2 版)
2020 年 5 月 29 日作成(新様式第 1 版)


製造販売届出番号 40B1X10003GE0136

歯科用エンジン (器 60) 歯科技工用機器
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 34713000

GEO スキャン DS-MIX

【 形状・構造及び原理等 】

1. 形状、構造

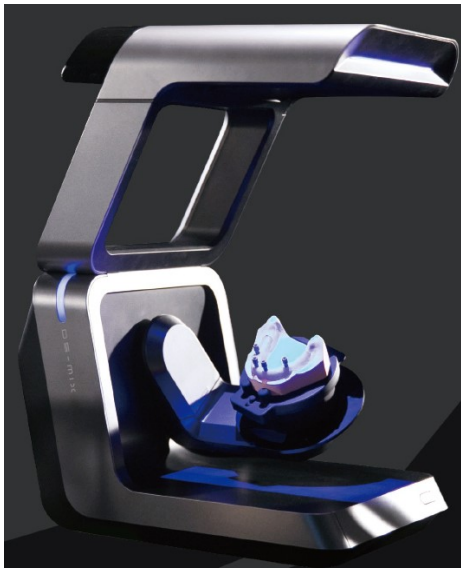

2. 仕様

寸法	238×340×447mm
光源	Blue LED
精度	≦7μm
電源	100 - 220V
機械重量	7.5 Kg
出力ファイル形式	STL、PLY

【 使用目的又は効果 】

本品は複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計(CAD)又はコンピュータ支援製造(CAM)に用いる。

【 使用方法等 】

詳細については取扱説明書(マニュアル)を参照すること。

1. テーブルに歯牙模型をのせる。
2. スキャナーの電源を入れ、起動する。
3. スキャンを開始する。
4. PC 上にスキャンした 3D データが表示されているか確認する。
5. 修復物の設計を行い、必要に応じてデータを保存する。

【 使用上の注意 】

1. スキャナーの先端から出る光を直視しないこと。また、光を他人に向けないこと。
2. 手技等を熟知したうえで使用すること。
3. 使用前後にカメラ部や光照射部の埃等を繊維の付着しない布地等でやさしく取り除くこと。
4. スキャナーのカメラ部や光照射部に直接触れないこと。
5. 液体に浸したり、スプレーをかけたりしないこと。
6. 作業温度は 10℃～30℃で行うこと。
7. 機器は平坦で水平な場所に設置すること。またスキャナーを湿気の高い場所、塵やホコリがたまりやすい場所、または煙や蒸気と接触する場所に設置しないこと。
8. スキャナーの上に重いものを置いたりしないこと。
9. スキャナーを移動する際は、必ずスキャナー下部を持つこと。
10. 本システム以外の機器を接続しないこと。接続の際は、必ずマニュアル等を参照すること。
11. しばらく使用していない状態の後、再度使用する場合は、必ずキャリブレーションや各部の作動確認を行ってから使用すること。
12. 故障の際は、有資格者・専門家以外修理を行わないこと。

【 保管方法及び有効期間等 】

直射日光の当たらない場所に保管する。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

*製造販売業者:株式会社ジオメディ

福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル

TEL:092-409-4050 FAX:092-409-4051

外国製造業者:Shining 3D Tech Co., Ltd.

(シャイニングスリーディーテック)

外国製造所国:中華人民共和国