

*2022 年 3 月 1 日作成(第 2 版)
2020 年 5 月 29 日作成(第1版)

製造販売届出番号 40B1X10003GE0137

機械器具 (60) 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 34713000

Metal プリンター EP-M150

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 仕様

寸法	1.75×0.8×1.9m
レーザー	200／500W
機械重量	800Kg
電源	220V
ファイル形式	STL

【使用目的又は効果】

本品は、複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計(CAD)又はコンピュータ支援製造(CAM)に用いる。

【使用方法等】

使用する際は、マニュアルを参照すること。

1. 電源を入れる。
2. 基板プレートとブレードを取り付ける。
3. 金属粉末をセットする。
4. 造形を開始する。

【使用上の注意】

1. 訓練を受け、添付文書やマニュアルを理解した者が使用すること。
2. 本品はレーザーを使用するため、必要に応じ保護メガネ等を着用すること。
3. 作動時はドアを閉めること。
4. 目的用途以外には使用しないこと。
5. 精密機器のため、取扱には十分注意すること。
6. 機器を分解、修理、改造しないこと。
7. 異常発生又は故障の際は、有資格者・専門家以外修理を行わないこと
8. 濡れた手でプラグ及び電源スイッチに触れないこと。
9. 引火しやすいので作業場には火気を持ち込まないこと。
10. 使用前後の手入れ方法についてはマニュアルを参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光を避け、水のかからない室内に保管すること。
2. 振動、衝撃を受けない平坦で安定した場所に保管すること。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
4. 関係者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者:株式会社ジオメディ

福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル

TEL:092-409-4050 FAX:092-409-4051

外国製造業者:Shining 3D Tech Co., Ltd.

(シャイニングスリーディーテック)

外国製造所国:中華人民共和国