

**2023 年 2 月 6 日 (改訂第 4 版)
*2022 年 3 月 1 日 (改訂第 3 版)

製造販売届出番号 40B1X10003GE0139

歯科材料 (08) 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 34811000

Accu Fab モデルレジン

【形状・構造及び原理等】

(1) 形状・構造

モデルタイプ	モデル名
Dental Model	** DM03
	DM12
	** DM15
Ortho Model	OD01
	** OD02
Gingiva Mask	GM11

(2) 原理

本品は UV ライト照射により重合し、硬化する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社ジオメディ
* 福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL:092-409-4050 FAX:092-409-4051
外国製造業者:SHINING 3D TECH Co.,Ltd.
(シャイニングスリーディーテック)
外国製造所国:中華人民共和国

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる各種高分子からなる材料である。

【使用方法等】

- (1) 本品は、よく攪拌して使用する。
- (2) 使用する3D プリンターの使用方法に従い、本品をセットする。
- (3) 20～30℃の温度を維持して造形する。
- (4) 造形後、造形物を取り出し、アルコール等で洗浄する。
- (5) 必要に応じて二次硬化を行う。

【使用上の注意】

- (1) 歯科技術に熟練し、かつ製品特性を十分に理解した歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。
- (2) 記載の使用目的以外には使用しないこと。
- (3) 手袋を着用して使用し、皮膚に付着した場合は流水で洗浄すること。
- (4) 目に入らないように注意すること。万が一目に入った時は、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- (2) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。