

医療用品(04) 整形用品
一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料 70914000

Accu Fab SG レジン

【形状・構造及び原理等】

(1) 形状・構造

モデルタイプ	モデル名
Surgical Guide	SG01

(2) 原理

本品は UV ライト照射により重合し、硬化する。

【使用目的又は効果】

本品は、使用期間が30日を超えない歯科用咬合スプリントを作製するために用いる材料である。

【使用方法等】

- 本品は、よく攪拌して使用する。
- 使用する3D プリンターの使用方法に従い、本品をセットする。
- 20～30℃の温度を維持して造形する。
- 造形後、造形物を取り出し、アルコール等で洗浄する。
- 必要に応じて二次硬化を行う。

【使用上の注意】

- 歯科技術に熟練し、かつ製品特性を十分に理解した歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。
- 記載の使用目的以外には使用しないこと。
- 手袋を着用して使用し、皮膚に付着した場合は流水で洗浄すること。
- 目に入らないように注意すること。万が一目に入った時は、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者:株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL:092-409-4050 FAX:092-409-4051
外国製造業者:SHINING 3D TECH Co.,Ltd.
(シャイニングスリーディーテック)
外国製造所国:中華人民共和国