

*2022 年 3 月 1 日作成(第 2 版)
2020 年 7 月 20 日作成(第 1 版)

製造販売届出番号 40B1X10003GE0145

歯科材料 (08) 歯科用石膏及び石膏製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 34811000
ODS 3D プリンターレジン GUM

【形状・構造及び原理等】

- 1.構成品及び種類
容量:250g
- 2.原理
本品は、紫外線により重合硬化する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者:株式会社ジオメディ
福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL:092-409-4050 FAX:092-409-4051
外国製造業者:ODS Co.,Ltd.
(オーディーエス)
外国製造所国:大韓民国

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる各種高分子からなる材料である。

【使用方法等】

- 1.本品使用前に劣化していないか確認し、十分に攪拌する。
- 2.使用する 3D プリンターのマニュアルに従って、本品をセットし、造形する。
- 3.造形完了後、出力した造形物を取り外し、アルコール等に浸して洗浄する。(超音波洗浄を推奨する。)
- 4.必要に応じて、使用する硬化器のマニュアルに従い二次硬化させる。

※推奨する併用医療機器

販売名:3D プリンター AccuFab-D1

一般的名称:歯科技工室設置型コンピュータ
支援設計・製造ユニット

届出番号:40B1X10003GE0129

製造販売業者:自社

【使用上の注意】

- 1.本品の使用に際しては、歯科技術に熟練し、かつ製品特性を十分に理解した歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。
- 2.本品は記載の使用目的以外には使用しないこと。
- 3.3Dプリンター、硬化器を使用する際には、添付文書、マニュアル等を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.高温多湿を避け、暗所で保管すること。
- 2.歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。