

*2022 年 3 月 1 日 (改訂第 2 版)
2021 年 1 月 15 日 (新様式第 1 版)

製造販売届出番号 40B1X10003GE0149

機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000
ARUM 歯科用インプラント技工パーツ

【禁忌・禁止】

- 併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- 適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。
- 本品は模型上で使用するものであり、口腔内では使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

①Scan Body



②Lab Analog



③ARUM SCREW DRIVER



④Scan Body Screw



⑤Lab Screw



構成品の名称		原材料		
①Scan Body		SUS 303F		
②Lab Analog		SUS 303F		
③ARUM SCREW DRIVER	Clinic Ball Screw Driver	Carpenter Trimrite		
	Clinic Tip Screw Driver	Carpenter Trimrite		
	Lab Screw Driver	Driver	Carpenter Trimrite	
		Cap		
		Handle		
		6061 Aluminum		
④Scan Body Screw		ELI Titanium Alloy		
⑤Lab Screw		ELI Titanium Alloy		

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

<①Scan Body、②Lab Analog、④Scan Body Screw>

- 対応する製品を選択する。
- Scan Body と Lab Analog を組み合わせた後、Scan Body Screw で締結する。

<③ARUM SCREW DRIVER>

1) Clinic Ball Screw Driver、Clinic Tip Screw Driver

- 製品に損傷や不純物がないか確認する。
- 使用前にヘッド部の高圧蒸気滅菌 (オートクレーブ 1.5 気圧、121℃、30 分) を行う。
- Clinic Ball Screw Driver: スクリューの固定および分解にはラチェットを使用する。
Clinic Tip Screw Driver: スクリューの固定および分解にはハンドピースを使用する。

2) Lab Screw Driver

- 製品に損傷や不純物がないか確認する。
- 使用前にヘッド部の高圧蒸気滅菌 (オートクレーブ 1.5 気圧、121℃、30 分) を行う。
- ヘッド、ドライバーハンドル、エンドカバーを組み立てる。
- スクリューの固定および分解は手動で行う。

<⑤Lab screw>

- アバットメントは Lab screw でしっかりと締結する。
- アバットメントがしっかりと固定されていることを確認する。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。使用に際しては歯科医療有資格者が適用の可否を判断すること。
- 本製品は本書に記載の使用目的以外に使用しないこと。

【包装】

包装単位: 1 個/箱又は 1 セット

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者: 株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL: 092-409-4050
FAX: 092-409-4051

外国製造業者: ARUM DENTISTRY Co., Ltd.
(アルムデンティストリー)

外国製造所国: 大韓民国