

**2025 年 7 月 22 日作成（改訂第 3 版）

*2022 年 3 月 1 日作成（改訂第 2 版）

製造販売届出番号 40B1X10003GE0149

整形用器具器械（58） 歯科用技工用機器
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000


ARUM 歯科用インプラント技工パーツ

【禁忌・禁止】



- ・併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- ・適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。
- ・本品は模型上で使用するものであり、口腔内では使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】


① Scan Body

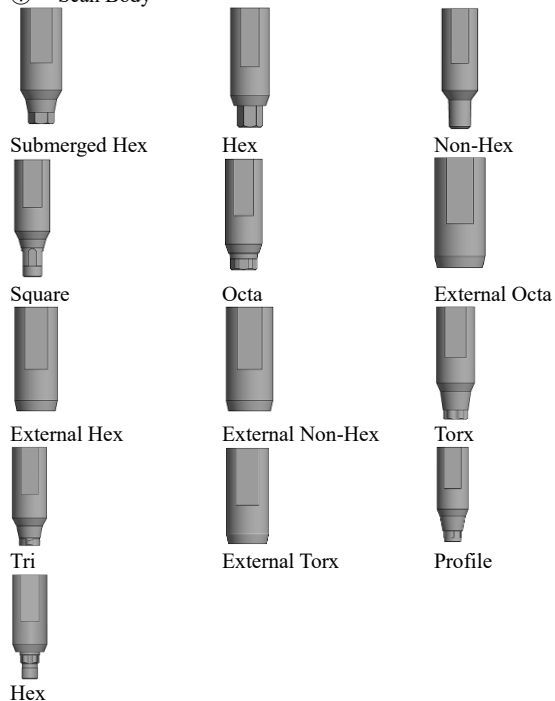

② Lab Analog

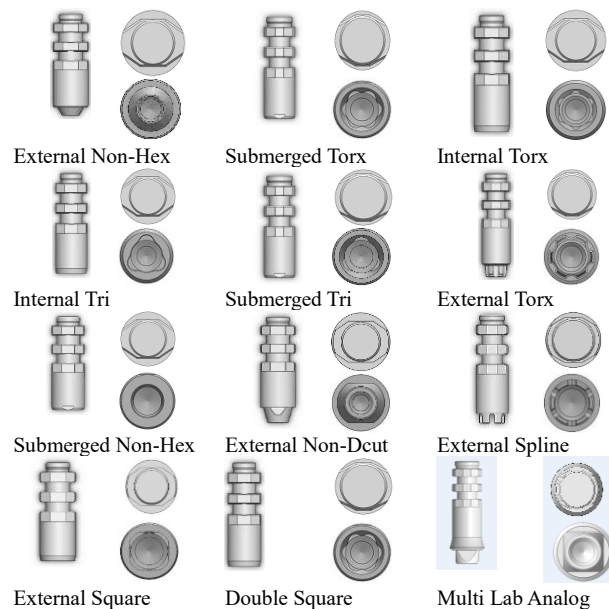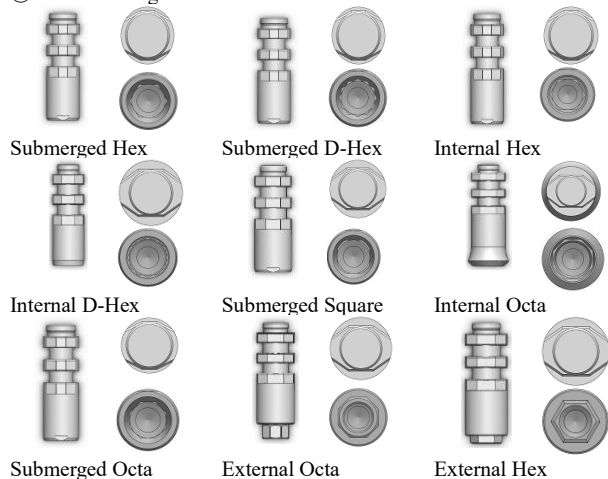

③ ARUM SCREW DRIVER

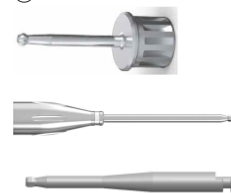

④ Scan Body Screw



⑤ Lab Screw



⑥ iPen ホルダー



⑦ iPen スタンド



⑧ Screw driver tips



⑨ Analog insertion tips



⑩ Torque adapter



⑪ Setting Screw



**

構成品の名称		原材料	
①Scan Body		SUS 303F	
②Lab Analog		SUS 303F	
③ ARUM SCREW DRIVER	Clinic Ball Screw Driver	Carpenter Trimrite	
	Clinic Tip Screw Driver	Carpenter Trimrite	
	Lab Screw Driver	Driver	Carpenter Trimrite
		Cap	
Handle		6061 Aluminum	
④Scan Body Screw		ELI Titanium Alloy	
⑤Lab Screw		ELI Titanium Alloy	
⑥iPen ホルダー		Stainless	
⑦iPen スタンド		Stainless	
⑧Screw driver tips		Stainless	
⑨Analog insertion tips		Stainless	
⑩Torque adapter		Stainless	
⑪Setting Screw		SUS303F	

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる
歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

＜①Scan Body、②Lab Analog、④Scan Body Screw＞

1. 対応する製品を選択する。
2. Scan Body と Lab Analog を組み合わせた後、Scan Body Screw で締結する。

＜③ARUM SCREW DRIVER＞

- 1) Clinic Ball Screw Driver、Clinic Tip Screw Driver
 1. 製品に損傷や不純物がないか確認する。
 2. 使用前に高圧蒸気滅菌（オートクレーブ 1.5 気圧、121℃、30 分）を行う。
 3. Clinic Ball Screw Driver：スクリューの固定および分解にはラチェットを使用する。
Clinic Tip Screw Driver：スクリューの固定および分解にはハンドピースを使用する。
- 2) Lab Screw Driver
 1. 製品に損傷や不純物がないか確認する。
 2. 使用前にヘッド部の高圧蒸気滅菌（オートクレーブ 1.5 気圧、121℃、30 分）を行う。
 3. ヘッド、ドライバハンドル、エンドカバーを組み立てる。
 4. スクリューの固定および分解は手動で行う。

＜⑤Lab screw＞

1. アバットメントは Lab screw でしっかりと締結する。
2. アバットメントがしっかりと固定されていることを確認する。

【使用上の注意】

- 1）重要な基本的注意
 - ①歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。使用に際しては歯科医療有資格者が適用の可否を判断すること。
 - ②本製品は本書に記載の使用目的以外に使用しないこと。

【包装】

包装単位：1 個/箱又は 1 セット

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚 1 丁目 38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050
FAX：092-409-4051

外国製造者：ARUM DENTISTRY Co., Ltd.

外国製造所国：大韓民国