

*2022 年 3 月 1 日(改訂第 2 版)
2021 年 2 月 16 日(新様式第1版)

製造販売届出番号 40B1X10003GE0149

機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

ARUM 歯科用インプラント技工パーツ

iPen キット

【禁忌・禁止】

1. 本品は模型上で使用するものであり、口腔内では使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】



構成品の名称	用途
①iPen ホルダー	ドライバー、アダプターの把持部
②iPen スタンド	パーツの収納スタンド
③Screw driver tips	モデルスキャンボディ、アナログの締結
④Analog insertion tips	3D 模型へのアナログの挿入
⑤Torque adapter	リバースジグとプレミルの締結

本品は、一般的名称: 歯科インプラント技工用器材
販売名: ARUM 歯科用インプラント技工パーツ
(製造販売届出番号: 40B1X10003GE0149)
の構成品からなるキットである。

【使用方法等】

<①iPen ホルダー>

Screw driver tips、Analog insertion tips、Torque adapter 等を接続し、把持部とする。

<②iPen スタンド>

iPen ホルダー、Screw driver tips、Analog insertion tips、Torque adapter を収納する。

<③Screw driver tips>

モデルスキャンボディ、アナログを締結する。

③Screw driver tips



<④Analog insertion tips>

3D 模型にアナログを挿入する。

④Analog insertion tips



<⑤Torque adapter>

リバースジグとプレミルを締結する。

⑤Torque adapter



※リバースジグ、プレミルは本品には含まない。

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

1. 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。使用に際しては歯科医療有資格者が適用の可否を判断すること。
2. 本製品は本書に記載の使用目的以外に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者: 株式会社ジオメディ

福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル

TEL: 092-409-4050

FAX: 092-409-4051

外国製造業者: ARUM DENTISTRY Co., Ltd.

(アルムデンティストリー)

外国製造所国: 大韓民国