

\*2022年3月1日(第2版)  
2021年8月2日(第1版)

製造販売届出番号 40B1X10003GE0155

歯科材料 (03) 義歯床材料  
一般医療機器 歯科印象トレー用レジン 70832000

## Accu Fab トレー

### 【形状・構造及び原理等】

#### (1) 形状・構造

モデルタイプ	モデル名
Tray	TR01

#### (2) 原理

本品は UV ライト照射により重合し、硬化する。

### 【使用目的又は効果】

本品は液体の常温重合レジンで、個人トレー、ベースプレート等に用いる。

### 【使用方法等】

- (1) 本品は、よく攪拌して使用する。
- (2) 使用する3D プリンターの使用方法に従い、本品をセットする。
- (3) 20～30℃の温度を維持して造形する。
- (4) 造形後、造形物を取り出し、アルコール等で洗浄する。
- (5) 必要に応じて二次硬化を行う。

### 【使用上の注意】

- (1) 歯科技術に熟練し、かつ製品特性を十分に理解した歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。
- (2) 記載の使用目的以外には使用しないこと。
- (3) 手袋を着用して使用し、皮膚に付着した場合は流水で洗浄すること。
- (4) 目に入らないように注意すること。万が一目に入った時は、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- (2) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*製造販売元:株式会社ジオメディ  
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル  
TEL:092-409-4050 FAX:092-409-4051  
外国製造業者:SHINING 3D TECH Co.,Ltd.  
(シャイニングスリーディーテック)  
外国製造所国:中華人民共和国