

添付文書

2024 年 10 月 01 日 作成 (第1版)

医療機器届出番号 40B1X10003GE0190

機械器具(60) 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 34713000

リリビスプリント LP-100

【警告】

- 必ず操作手順に従ってご使用ください。
- 本機の定格（電圧、周波数）に適合する電源コンセントに接続してください。
- 燃えやすいものがあるそばに設置しないでください。
- 緊急時にすばやく電源プラグを抜けるようにしてください。

【禁忌・禁止】

- 濡れた素手でプラグ及び電源スイッチに触れないでください。
- 引火しやすいので作業場には火気を持ち込まないでください。
- 勝手に分解、修理、改造はしないでください。事故につながる恐れがあります。
- 屋外、水のかかる場所、湿気の多い場所には設置しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 仕様

	LP-100	LC-100
寸法	325×325×424mm	271×272×303
光源、波長	405nm, Arrayed LED	395～405 nm, UV LED
機械重量	15.3kg	8.5kg
電源	100-200VAC 4A 200-240VAC 2.4A	100-120V 5.80A 50/60Hz 200-230V 3.20A 50/60Hz
その他	解像度(X/Y):50 μm 解像度(Z):10-200 μm	チャンバーサイズ: Φ150×110mm

3. 原理

本品は、光硬化性樹脂に設計通りに UV 光を当て、重合反応を利用して造形する3D プリンター及び光重合装置から成る。

【使用目的又は効果】

本品は、複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計(CAD)又はコンピュータ支援製造(CAM)に用いる。

【使用方法等】

- 本品は歯科用パーツのコンピュータ支援製造に用いるものです。
- 具体的使用方法是マニュアルをご参照ください。

【使用上の注意】

- 担当者以外は触らないこと。
- 使用しない時は電源コンセントを抜くこと。
- 使用時アースを接続すること。
- 作動時はドアを閉めること。
- 目的用途以外は使用しないこと。
- 精密機器のため、取扱には十分注意すること。
- 機器を分解、修理、改造しないこと。
- 異常発生又は故障したときは、直ちに担当者又は当社指定の業者に連絡すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光を避け、水のかからない室内に保管する。
- 振動、衝撃を受けない平らで安定した場所に保管する。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。
- 関係者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社ジオメディ
福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL:092-409-4050
FAX:092-409-4051

外国製造業者:Huvitz Co.,Ltd.(ヒュビツ)

外国製造所国:大韓民国