

歯科用鑄造器 (70) 歯科技工用機器
一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼成炉 35762000

5G スピードシンタリングファーンズ CSF-400 Pro

【警告】

- ①本器は歯科技工用のポーセレン焼成炉です。
他の用途には使用しないこと。
- ②機械の操作は習熟したもの以外は使用しないこと。
- ③使用者の安全を守り、機械を正しく使用するために注意事項を必ず守ること。
- ④故障したときは、適切な指示を行い、修理は専門家に任せること。
- ⑤高温の焼成物質を扱うため、焼成物の扱いは断熱手袋や専用のピンセット等を装備して、やけどをしないように注意すること。また、保護めがねを着用すること。

【禁忌・禁止】

次の行為は危険ですのでやめてください。

- ①機械の改造
- ②不具合、故障状態での使用
- ③未整備状態での使用
(未整備状態とは、定期点検や日常の点検をしてない状態をいう)

【形状・構造及び原理等】

装置外観図



寸法 516×385×816 mm
(炉内寸法 85φ×110mm)

電氣的定格

電源	AC200V 50/60Hz 16A
消費電力	3,5kW

最高温度 1600℃

【使用目的又は効果】

本品はジルコニアを焼成するために歯科技工で使われる炉をいう。

【使用方法等】

詳細の設置方法や使用方法については、付属の取扱説明書を必ず参照して下さい。

1) 取付・設置

- ①機器の取り付け、設置は専門知識を持った担当者が行なうこと。
- ② 機器の詳細な取り付け、設置は付属の取扱説明書を参照すること。
- ③機器は安定した、しっかりした台の上に設置すること。

2) 操作方法または、使用方法

機器の詳細な操作方法および、使用方法は付属の取扱説明書を必ず読むこと。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

- 1) 熟練した歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 使用前に取扱説明書を必ず読むこと。
- 3) 記載の使用目的、使用方法以外で使用しないこと。
- 4) 分解、改造しないこと。
- 5) 本器の作動中は、機械が正常に機能していることを常に監視すること。
- 6) 本器の加熱中及び加熱後は焼成台及びその周囲が高温となるため火傷に注意すること。
- 7) 電源コードを接続する際は、本体の電源スイッチがきれていることを確認すること。
- 8) 本器に異常が発見された場合は、速やかに機器の使用を中止し、適切な措置をとること。
- 9) 故障の際は、有資格者・専門家以外修理を行わないこと。

【保管方法及び有効期間】

- 1) 水のかからない場所に保管すること。
- 2) 本器は、高温、多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- 3) 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。
- 4) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- 5) 使用後は埃等を取り除くこと。

【保守・点検に関わる事項】

詳細については取扱説明書を参照すること。

- 1) 本器及び付属品は、必ず定期的に点検を行うこと。
- 2) しばらく使用してない状態の後再度使用する場合は、必ず各部の作動確認を行ってから使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ジオメディ

福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル

TEL：092-409-4050

FAX：092-409-4051

外国製造業者：Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd.

外国製造所国：中国

