

機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

ARUM 口腔内用スキャンボディ


【禁忌・禁止】

1. 本製品に含まれる材料のいずれかにアレルギー又は過敏症のある患者は、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、以下のものから構成され、単品又は組み合わせて製造販売される。

① Intraoral Scanbody

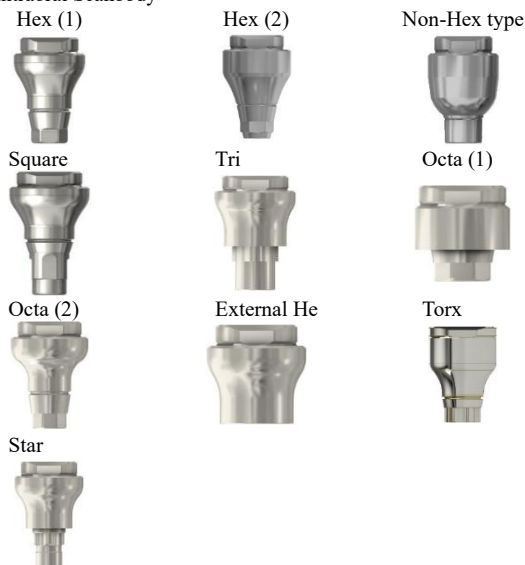

② Intraoral Scanbody Screw



③ Multi Scanbody



④ Multi Scanbody Screw



⑤ Scanbody



⑥ Scanbody Screw



⑦ Jig (Accessory)



原材料:チタン合金、PEEK

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料である。

【使用方法等】

(使用前)

本製品は未滅菌状態で納品されるため、使用前に洗浄及び滅菌をすること。

(121℃30 分滅菌、30 分乾燥)

1. ドライバーを使用してネジを手で締め、口腔内スキャンボディをインプラントに接続する。
2. スキャナーメーカーの指示に従って、患者の口腔内スキャンを行う。
3. ネジを緩めて口腔内スキャンボディを取り外す。
4. スキャンファイルをラボに送信する。

【使用上の注意】

- ① 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。使用に際しては歯科医療有資格者が適用の可否を判断すること。
- ② 本製品は本書に記載の使用目的以外に使用しないこと。

【包装】

包装単位：1 個/箱又は 1 セット

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：株式会社ジオメディ

連絡先：092-409-4050

外国製造業者：ARUM DENTISTRY Co.,Ltd.

(あるむ でんていすとりー)

外国製造業者国名：大韓民国

取扱説明書を必ずご参照ください。