


ジオミル ARUM A7L

【禁忌・禁止】

- ① 本製品を使用目的以外に使用しないこと。
- ② 劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。
- ③ 器具の形態変更や改造等をしないこと。

【形状・構造及び原理等】

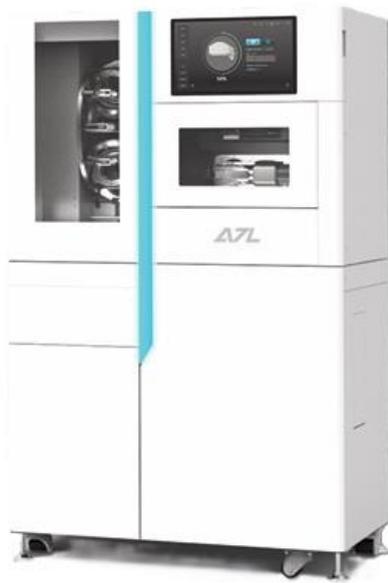

番号	構成部品名称
①	本体
②	電源ケーブル

	項目	規格
1	寸法	1060mm(W)x 900mm(H)x 1750mm(D)
2	重さ(本体/テーブル)	300 kg/137 kg
3	スピンドル回転数	60,000 rpm
4	軸	5 軸
5	定格電圧	220V 以上で使用可能
6	周波数	50/60Hz

【使用目的又は効果】

本品は複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計(CAD)又はコンピュータ支援製造(CAM)に用いるものをいう。

【使用方法等】

- 1) 各機器の電源コードをコンセントに差し込み電源スイッチを入れる。
- 2) 制御用 PC を稼働させ、CAD-CAM 制御プログラムを立ち上げる。
- 3) 本体と制御用 PC との通信状態を確認する。
- 4) 本体扉を開き、ミリングバー及び切削材料を取り付ける。
- 5) 加工ファイルデータを読み込み、切削加工を行う。
- 6) 切削加工終了後、CAD-CAM 制御プログラムを終了し、本体の電源スイッチを切る。

【使用上の注意】

- 1) 術者は、手技等を熟知したうえで使用すること。
- 2) 素材のステンレス鋼は鉄に比べて錆びにくい金属であるが、使用方法及び環境によって錆びることがあるので十分に注意すること。
- 3) 金属腐食を起こす恐れのある薬剤、超酸性水等は使用しないこと。
- 4) 使用後は埃等を取り除くこと。
- 5) 【保守・点検に係る事項】を参照し、保守・点検を行うこと。
- 6) 可燃性ガスの付近では使用しないこと。
- 7) 故障の際は、有資格者・専門家以外修理を行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 直射日光を避け、水のかからない室内に保管する。
- 2) 振動、衝撃を受けない平らで安定した場所に保管する。
- 3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。
- 4) 関係者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取り扱い説明書を参照すること。

- 1) 必ず定期的に点検を行うこと。
- 2) しばらく使用してない状態の後再度使用する場合は、必ず各部の作動確認を行ってから使用すること。
- 3) 故障した場合は、訓練を受けた有資格者以外は修理しないこと。また、修理は専門家に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・ 製造販売業者:株式会社ジオメディ
福岡市博多区吉塚1-38-28 ジオビル
TEL:092-409-4050
FAX:092-409-4051
- ・ 外国製造所業者: ARUM DENTISTRY Co., Ltd
(あるむ でんていすとリー)
外国製造所国名: 大韓民国

取扱説明書を必ずご参照ください。