

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器  
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDNコード:35761000

# 光重合器 FabCure 2

## 【警告】

- ① 定められた電圧、周波数以外では使用しないこと  
(火災・感電の原因となる)
- ② 点灯中または消灯直後のライトや周囲に手指を触れないこと  
(高温によるやけど、火災、機器の故障の原因となる)
- ③ 照射中及び照射直後に、お手入れやライトの交換を行わないこと。  
(やけど、火災などの原因となる)
- ④ ヒューズが切れた場合は、電氣的に問題がある可能性があるため、速やかに修理点検を依頼すること。  
(漏電などによる事故・故障の原因となる)
- ⑤ 使用目的に応じて使用すること。  
(故障、事故の原因となる)

## 【禁忌・禁止】

- ① 濡れた素手でプラグ及び電源スイッチに触れないこと。
- ② 引火しやすいため作業場には火気を持ち込まないこと。
- ③ 事故につながる恐れがあるため、勝手に分解、修理、改造はしないこと。
- ④ 屋外、水のかかる場所、湿気の多い場所には設置しないこと。

## 【形状・構造及び原理等】



本体サイズ (mm)	290×367.5×290
重量 (Kg)	10.5
波長 (nm)	385~405
電氣的定格	AC100-240V

## 【使用目的又は効果】

歯科技工室で、高分子材料を重合するために用いる装置をいう。光を照射させて重合を行う。

重合可能材料：3Dプリンター樹脂等

## 【使用方法等】

具体的使用方法はマニュアルを参照のこと。

1. コンセントに電源コードをさす
2. 重合する光重合型のレジン等を本体内部のトレーに置く
3. 電源をいれ、ライトを点灯させ重合させる。
4. 重合後は必ず電源を落とし保管する。

## 【使用上の注意】

- (1) 本機の光を直視したり、光源を覗かないこと。
- (2) ヒーター等、熱源の近くに本器を置かないこと。
- (3) 本器のそばに可燃物を置かないこと。
- (4) 本器は、換気の良い場所で使用すること。
- (5) 可燃性のガスが空気中にある環境で使用しないこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

- (1) 直射日光を避け、水のかからない室内に保管する。
- (2) 振動、衝撃を受けない平らで安定した場所に保管する。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。
- (4) 関係者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

## 【製造販売者及び製造者の氏名又は名称等】

製造販売者：株式会社ジオメディ  
福岡県福岡市博多区吉塚1-38-28 ジオビル  
TEL：092-409-4050  
FAX：092-409-4051

外国製造業者：Shining3D Tech Co., Ltd.

外国製造所国：中華人民共和国