

オーガニカル CAD・CAM ワックス

【形状・構造及び原理等】

形状

98mm×14mm	ハード
98mm×17mm	ハード
98mm×20mm	ハード
98mm×14mm	ソフト
98mm×17mm	ソフト
98mm×20mm	ソフト

・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 C・C・A・A
住所：名古屋市守山区苗代二丁目4-27
TEL：052-799-3951 FAX：052-799-3952

製造業者：有限会社ブロッブ



作動・動作原理

本製品をコンピュータ支援設計・製造ユニットの切削加工機を用いて切削加工し、パターンを作製する。

【使用目的又は効果】

使用目的

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型製作用のキャスティングワックスとして使用する。

【使用方法等】

使用方法

- ・本製品をコンピュータ支援設計・製造ユニット(CAM機)に装着し切削加工を行う。
- ・切削加工後、通法に従い、修正、埋没、焼却、鑄造を行う。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・目を保護するために保護めがね等を使用すること。
- ・本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認知した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本製品により研削した粉塵、破片が目に入らないように注意すること。万一目に入った時には、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・冷暗所に保管すること。
- ・本製品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光のあたる場所）に放置しないこと。