

オーガニカルポリッシングペースト

【形状・構造及び原理等】

組成

主成分：ダイヤモンド、牛脂

形状

30g・・・・・・・・・・・・・・・・・・68-1250



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 C・C・A・A

住所：名古屋市守山区苗代二丁目 4-27

TEL：052-799-3951 FAX：052-799-3952

製造業者：R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG

作動・動作原理

ダイヤモンド粒子を含有したペーストでブラシ、パフ、ホイール等に付着させた後、補綴物に押し当て研磨する。

【使用目的又は効果】

使用目的

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

使用方法

- ・本製品をハンドピースに装着されたブラシ、パフ、ホイール等に付け、回転させ断続的に補綴物に押し当て研磨する。
- ・本製品はジルコニア、ポーセレン等の艶出しに使用する。

使用方法に関連する使用上の注意

- ・本製品はブラシ、パフ、ホイール等に付け使用するが、回転数 15,000 min.⁻¹ 以上で使用しないこと。
- ・本製品は歯科技工用のために、口腔内で使用しないこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・目を保護するために保護めがね等を使用すること。
- ・本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認知した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本製品により研削した粉塵、破片が目に入らないように注意すること。万一目に入った時には、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・室温保管すること。
- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。